

O ASSISTENTE SIGNIA ESTÁ DISPONÍVEL NO SIGNIA APP



No Signia App, você tem dois tipos de controle:

1. Controle remoto tradicional com mudanças rápidas de volume e balanço do som (equalizador entre grave e agudo) para mudanças temporárias, que são reiniciadas quando você desliga seus aparelhos auditivos;
2. Assistente Signia para ajustes personalizados para ajudá-lo a encontrar o som perfeito. As alterações permanecem mesmo após desligar seus aparelhos auditivos.

O Signia App é compatível com Android e iOS. Baixe gratuitamente na Apple Store ou Google PlayStore.



As informações deste documento contêm descrições gerais das opções técnicas disponíveis, que nem sempre devem estar presentes em casos individuais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Fabricante Legal

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Alemanha

Order No. 04301-99C1-7600 | Impresso no Brasil
© 06.2020 Signia GmbH

Encontre-nos em:

signia-ouvir.com.br



[signiahearing \(BR\)](https://www.facebook.com/signiahearing)



[signiahearing](https://www.youtube.com/signiahearing)




[@signiabrazil](https://www.instagram.com/signiabrazil)

Assistente Signia

ASSISTENTE SIGNIA

O ASSISTENTE PESSOAL DA SUA AUDIÇÃO

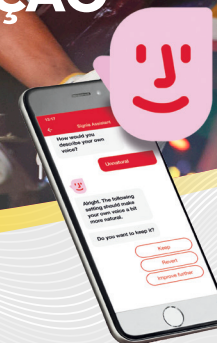

signia

signia-ouvir.com.br/assistente-signia

Life sounds brilliant.



ASSISTENTE ALTAMENTE INTELIGENTE


O novo Assistente Signia é o seu companheiro auditivo para que você escute o que realmente importa.

Com a **primeira rede neural do mundo** para aparelhos auditivos, o Assistente Signia é inspirado pela forma como o cérebro humano resolve desafios. Semelhante à forma como os neurônios do cérebro criam novas conexões para aprender novas habilidades e adquirir conhecimento, o Assistente Signia continuamente obtém novos insights para lhe dar uma experiência auditiva personalizada.


O Assistente Signia permite que você:

- Adapte as configurações às suas preferências pessoais para um som ainda mais claro e melhor compreensão da fala em todas as situações.
- Tire dúvidas sobre como manusear seus aparelhos auditivos.
- Tenha um suporte altamente intuitivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre que você precisar.
- Tenha liberdade para controlar os seus aparelhos auditivos com configurações de sua preferência.


Começando a usar o Assistente Signia

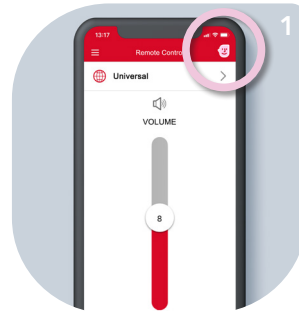


Ao abrir o aplicativo Signia, o rosto do Assistente Signia aparece no canto superior direito da tela.

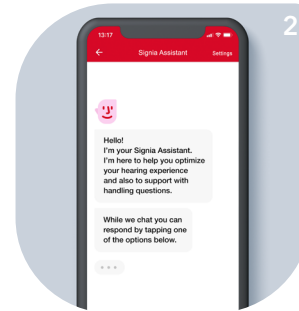


Basta clicar nele e o Assistente Signia irá recepcioná-lo e perguntar como ele pode ajudar.

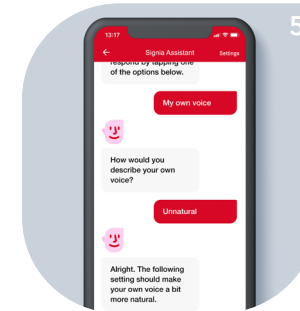


Com base em suas respostas, o Assistente sugere melhorias instantâneas de som para você.

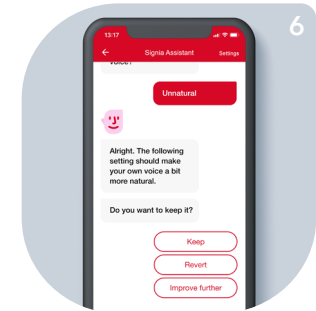


Você pode: manter as novas configurações, reverter ou continuar melhorando-as ainda mais.

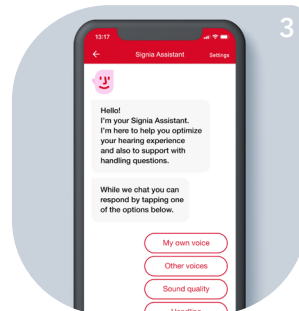


Escolha uma das opções apresentadas.

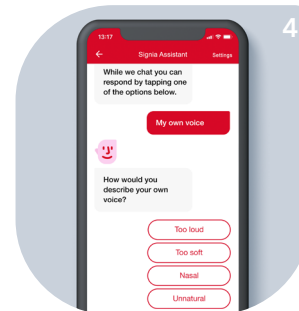

Continue a responder às perguntas do Assistente Signia.

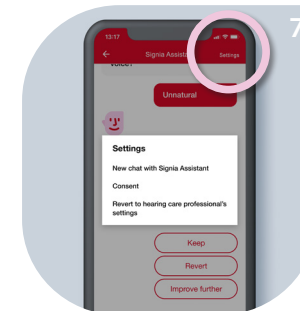

Em "Configurações" você pode iniciar um novo bate-papo, aprender sobre nossa política de dados e reverter de suas configurações atuais para as configurações feitas pelo seu fonoaudiólogo.

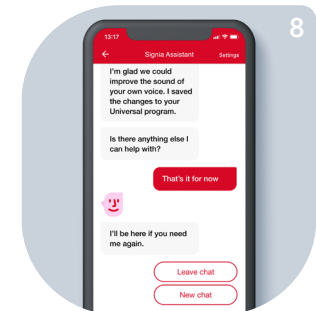

Você também tem a possibilidade de iniciar um novo bate-papo depois de terminar um diálogo com o Assistente Signia.

As mesmas etapas se aplicam ao lidar com perguntas.



Tudo que você precisa para começar a usar o Assistente Signia:

- Seu aparelho auditivo Signia Xperience com Bluetooth.
- Signia App instalado no seu smartphone.



8 em cada 10 pessoas recomendariam o uso de aparelhos auditivos com o Assistente Signia a um amigo.*

* Dados de pesquisa



93% dos usuários afirmam que o Assistente Signia aumenta sua confiança nos seus aparelhos auditivos e permite que eles se sintam mais no controle da sua audição.*

* Dados de pesquisa