


Quick Start Guide


Signia TV Sound mit Signia MaX Hörgeräten

Hochwertiger Stereo-Sound
direkt auf Ihre Bluetooth-fähigen
Signia Hörgeräte streamen.

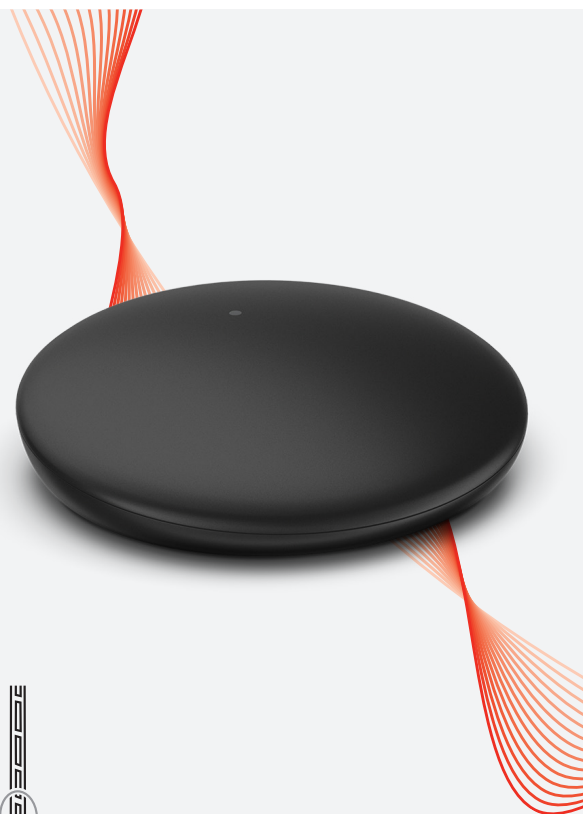

TV Sound einschalten

1. Nehmen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel Ihres TV Sound.
2. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker mit dem TV Sound.
3. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den USB-Anschluss Ihres Fernsehers.
4. Schalten Sie den Fernseher ein.

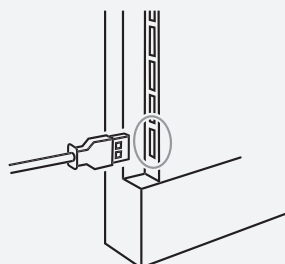


Hinweis: Wenn kein USB-Anschluss am Fernseher verfügbar ist, schliessen Sie das TV Sound über einen USB-Netzadapter an das Stromnetz an (mindestens 150 mA / 0,75 W).

Audioeingang verbinden


Über Analogkabel:

1. Verbinden Sie das analoge Audiokabel mit dem violetten Anschluss auf der Rückseite des TV Sound.
2. Stecken Sie die beiden analogen Stecker in die entsprechenden Buchsen am Fernseher.
3. Schalten Sie den Fernseher ein, um den Ton zu starten.

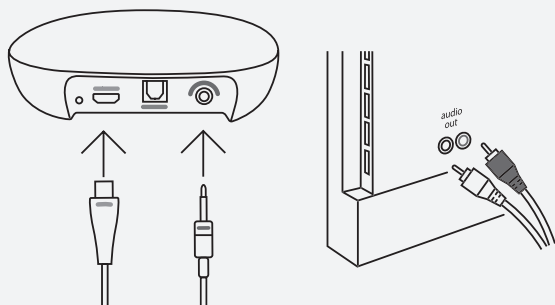

Über optisches Kabel (empfohlen für beste Audioqualität):

1. Verbinden Sie das optische Kabel mit dem blauen Anschluss auf der Rückseite des TV Sound.
2. Schliessen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss „Optical OUT“ am Fernseher an.
3. Schalten Sie den Fernseher ein, um den Ton zu starten.

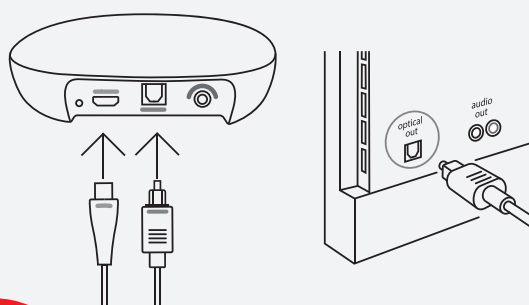

Quick Start Guide

Signia TV Sound

Koppeln Ihrer Hörgeräte mit TV Sound


1. Schalten Sie TV Sound ein.
2. Schalten Sie die Hörgeräte aus und wieder ein, indem Sie sie kurz in das Ladegerät setzen und dann herausnehmen. Dadurch wechseln die Hörgeräte für 3 Minuten in den Kopplungsmodus.
3. Halten Sie die Hörgeräte in einem Abstand von maximal 20 cm zum TV Sound.
 - LED blinkt blau während des Koppelvorgangs.
 - LED leuchtet 2 Sekunden lang dauerhaft blau und erlischt danach: Kopplung erfolgreich.
 - LED leuchtet dauerhaft grün, wenn ein Audiosignal vom Fernseher vorhanden ist.
 - LED blinkt grün, wenn kein Audiosignal vom Fernseher erkannt wird.



Zum Koppeln weiterer Hörgerätepaare wiederholen Sie einfach den gleichen Vorgang.


Tipp: Wenn die Hörgeräte bereits mit einem anderen Gerät (z. B. Smartphone) gekoppelt sind, stellen Sie sicher, dass sich dieses nicht in der Nähe befindet oder deaktivieren Sie dort Bluetooth® während der TV Sound Kopplung.

Streaming starten über die Signia One App

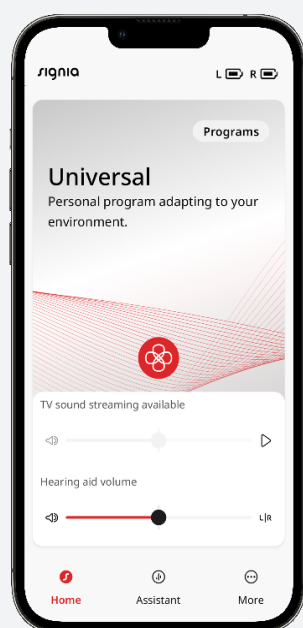

Schritt 1:

- Öffnen Sie die Signia One App.
- Sobald die Hörgeräte gekoppelt sind, erscheint die Play-Taste für TV Sound.

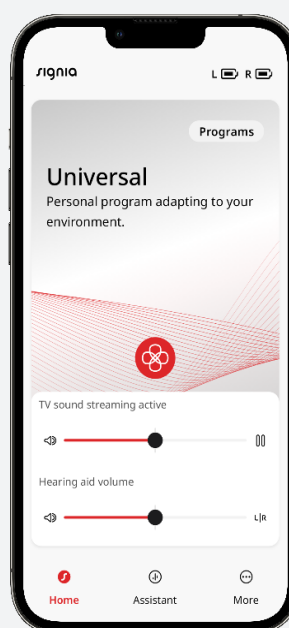

Schritt 2:

- Tippen Sie auf die Play-Taste rechts neben dem Lautstärkeregler, um das TV-Audio zu starten.
- Tippen Sie auf Pause, um das Streaming zu beenden.
- Passen Sie die Lautstärke über den Schieberegler an.

Streaming starten über die Hörgeräte-Taste

- Drücken Sie die untere Taste an einem der beiden Hörgeräte (links oder rechts) für etwa 3 Sekunden und lassen Sie dann los.
- Sie sollten nun den Fernsehton in Ihren Hörgeräten hören.

Hinweis: Ihr Hörakustiker kann diese Funktion während der Anpassung ändern.