

Quick Start Guide


Signia TV Sound avec aides auditives Signia MaX

Son stéréo haute qualité diffusé directement vers vos aides auditives Signia compatibles Bluetooth.



Mise sous tension du TV Sound

1. Prenez le câble Micro-USB fourni avec votre TV Sound.
2. Branchez le connecteur Micro-USB sur l'appareil TV Sound.
3. Connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre téléviseur.
4. Allumez le téléviseur.

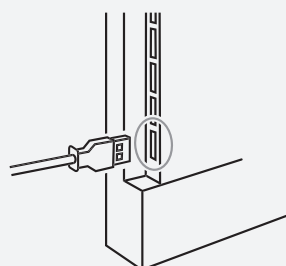

Remarque : Si votre téléviseur ne dispose pas de port USB, branchez le TV Sound sur le secteur à l'aide d'un adaptateur secteur USB (minimum 150 mA / 0,75 W).





Connexion de l'entrée audio

Avec le câble analogique :

1. Branchez le câble audio analogique dans l'entrée violette située à l'arrière du TV Sound.
2. Connectez les deux fiches analogiques dans les prises correspondantes du téléviseur.
3. Allumez le téléviseur pour lancer l'audio.

Avec le câble optique (recommandé pour la meilleure qualité audio) :

1. Branchez le câble optique dans l'entrée bleue située à l'arrière du TV Sound.
2. Connectez l'autre extrémité du câble optique à la sortie « Optical OUT » du téléviseur.
3. Allumez le téléviseur pour lancer l'audio.

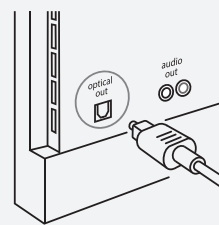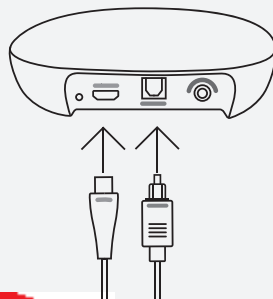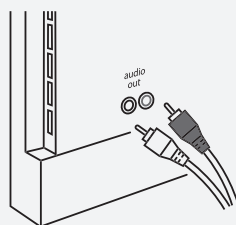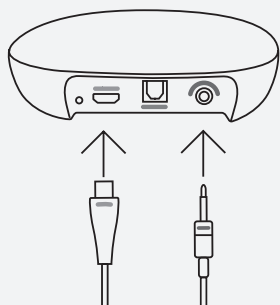

Quick Start Guide

Signia TV Sound

Appairage de vos aides auditives avec TV Sound


1. Allumez le TV Sound.
2. Éteignez puis rallumez les aides auditives en les plaçant dans le chargeur, puis en les retirant. Elles passent ainsi en mode appairage pendant 3 minutes.
3. Placez les aides auditives à moins de 20 cm du TV Sound.
 - LED clignote en bleu pendant l'appairage.
 - LED reste bleue fixes pendant 2 secondes puis s'éteint : appairage réussi.
 - LED verte fixe : signal audio reçu depuis la TV.
 - LED verte clignotante : aucun signal audio détecté.



Pour associer plusieurs paires d'aides auditives, répétez simplement la même procédure pour chaque paire.


Astuce : Si vos aides auditives sont déjà appairées à un autre appareil (par ex. un téléphone), assurez-vous que cet appareil n'est pas à proximité, ou désactivez le Bluetooth® pendant l'appairage au TV Sound.

Démarrer le streaming via l'application Signia One

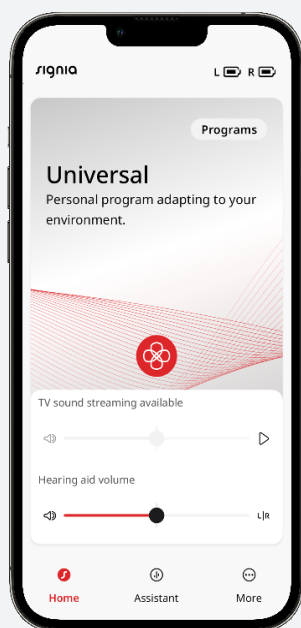

Étape 1 :

- Ouvrez l'application Signia One.
- Une fois l'appairage terminé, le bouton Lecture pour TV Sound apparaît.

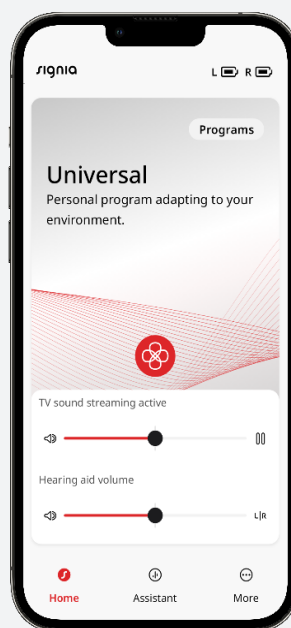

Étape 2 :

- Touchez le bouton Lecture à droite du curseur de volume TV Sound pour lancer le son TV.
- Touchez Pause pour arrêter le streaming.
- Ajustez le volume à l'aide du curseur.

Démarrer le streaming via le bouton de votre aide auditive

- Maintenez appuyé le bouton inférieur de l'une des deux aides auditives (gauche ou droite) pendant environ 3 secondes, puis relâchez.
- Vous devriez maintenant entendre le son TV dans vos aides auditives.

Remarque : Votre audioprothésiste peut modifier cette fonctionnalité lors de la session d'adaptation.