

# Instalace mobilní aplikace Signia App **Android**

- 1 V aplikaci Obchod Play si vyhledejte aplikaci Signia App a zadejte „Instalovat“.
- 2 V nainstalované aplikaci potvrďte, že „přijímáte“ a „akceptujete“ podmínky užívání.
- 3 Nyní vyberte z několika možností připojení: „Bluetooth“ pro sluchadla, která jsou jím vybavena, „QR kód“ pro kterákoliv sluchadla (QR kód vygeneruje Váš lékař při nastavování sluchadel), „ruční nastavení“, kdyby kterákoliv z předchozích možností nefungovala.

## Volba připojení přes Bluetooth

- 4 V možnosti Povolit aplikaci Signia App najít zařízení v okolí, zadejte „Povolit“.
- 5 Nyní restartujte sluchadla: u sluchadel Charge&Go vložením a vyndáním sluchadel do/z nabíječky, u bateriových sluchadel otevřením a zavřením bateriových dvířek.
- 6 Vyčkejte cca 10 sekund, než se sluchadla zapnou a uvedou do párovacího režimu a klikněte na „OK“.
- 7 Při vyhledávání sluchadel vyčkejte, až se Vám načtou obě sluchadla (pozn.: pravé + levé) a klikněte do pole, kde je uvedeno Vaše jméno a sluchadla.
- 8 Nyní již probíhá proces párování.
- 9 Pokud proběhlo párování úspěšně, proces potvrďte tlačítkem „Pojďme na to!“.
- 10 V okénku „vítejte v Telecare“ zaškrtněte možnost „Přeskočit telecare“.
- 11 Nyní jste již v prostředí aplikace Signia App.

## Volba připojení přes QR kód

- 4 V případě, že sluchadla párujete přes QR kód, zvolte tuto možnost.
- 5 Dále povolte aplikaci přístup k Vašemu fotoaparátu a klikněte na „Pokračovat“.
- 6 Namiřte fotoaparát mobilního telefonu na QR kód a klikněte na „Připojit“.
- 7 V nabídce zvýšení hlasitosti zvolte posuvník do střední polohy a zadejte „Aplikovat“.
- 8 V nabídce potvrzení tónu zvolte, zda jste slyšeli ve sluchadlech potvrzovací tóny. Pokud ne, párovací proces opakujte.
- 9 Pokud párování proběhlo úspěšně, proces potvrďte tlačítkem „Pojďme na to!“.
- 10 V okénku „vítejte v Telecare“ zaškrtněte možnost „Přeskočit telecare“.
- 11 Nyní jste již v prostředí aplikace Signia App.



**signia**

# Instalace mobilní aplikace Signia App iOS (iPhone)

- 1 V obchodě App Store si vyhledejte aplikaci Signia App a zadejte „Instalovat“.
- 2 Přejděte do Nastavení telefonu, rolujte dolů na Zpřístupnění.
- 3 V Zpřístupnění rolujte dolů na Sluchadla.
- 4 Vypněte a následně zapněte svá sluchadla.
- 5 Vyčkejte, až se název Vašich sluchadel zobrazí v horním řádku obrazovky.
- 6 Klikněte na název vašich sluchadel a zvolte tlačítko „Spárovat“.
- 7 Tlačítkem Home odejděte z nastavení telefonu a otevřete si staženou aplikaci Signia App.
- 8 V nainstalované aplikaci potvrďte, že „přijímáte“ a „akceptujete“ podmínky užívání.
- 9 Nyní vyberte z uvedených možností připojení: „Bluetooth“.
- 10 V možnosti Povolit aplikaci Signia App najít zařízení v okolí zadejte „Povolit“.
- 11 Nyní restartujte sluchadla: u sluchadel Charge&Go vložením a vyndáním sluchadel do/z nabíječky, u bateriových sluchadel otevřením a zavřením bateriových dvířek.
- 12 Vyčkejte cca 10 sekund, než se sluchadla zapnou a uvedou do párovacího režimu a klikněte na OK.
- 13 Při vyhledávání sluchadel vyčkejte, až se Vám načtou obě sluchadla (pozn.: pravé + levé) a klikněte do pole, kde je uvedeno Vaše jméno a sluchadla.
- 14 Nyní již probíhá proces párování.
- 15 Pokud proběhlo párování úspěšně, potvrďte proces tlačítkem „Pojďme na to!“.
- 16 V okénku „Vítejte v Telecare“ zaškrtněte možnost „Přeskočit telecare“.
- 17 Nyní jste již v prostředí aplikace Signia App.

## Kontakt na sluchová centra

Praha

Molákova 576/11, 186 00 Praha 8 - Karlín  
sluchadla.cz@sivantos.com  
tel. 257 328 161

Brno

Veletržní 684/3, 603 00 Brno  
sluchadlabrno.cz@signia-pro.com  
tel. 725 020 808

[www.signia.net](http://www.signia.net)



signia