


Zvukovodová **sluchadla**

Insio Nx ITC, Insio Nx ITE

Uživatelská příručka

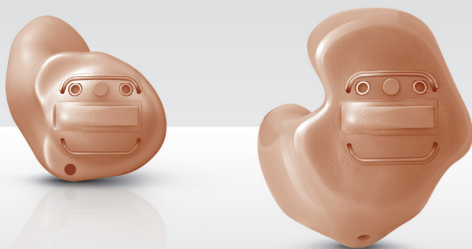

Made for

iPhone | iPad | iPod

Obsah

Vítejte	4
<hr/>	
Vaše sluchadla	5
<hr/>	
Typ sluchadla	5
Seznamte se se svými sluchadly	6
Součásti a názvy	7
Ovládací prvky	8
Naslouchací programy	10
Vlastnosti	10
Baterie	11
<hr/>	
Velikost baterie a rady týkající se zacházení	11
Výměna baterií	12
Každodenní použití	13
<hr/>	
Zapínání a vypínání	13
Vkládání a vyjímání sluchadel	14
Nastavení hlasitosti	16
Změna naslouchacího programu	16
Další nastavení (volitelné)	17
Speciální poslechové situace	18
<hr/>	
Telefonování	18
Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu	19
Režim „v letadle“	19

Údržba a péče	20
Naslouchací přístroje	20
Profesionální údržba	21
Další informace	22
Bezpečnostní informace	22
Příslušenství	22
Symbole použité v tomto dokumentu	23
Odstraňování potíží	24
Specifické informace pro danou zemi	26
Servis a záruka	27

Vítejte

Děkujeme vám, že jste si vybrali naše sluchadla, aby vás doprovázela vašim každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového vám bude chvíli trvat, než se s nimi seznámíte.

Tato příručka spolu s podporou vašeho foniatra Vám pomohou pochopit výhody a vyšší kvalitu života, kterou vám sluchadla nabízejí.

Aby vám sluchadla poskytla maximální přínos, doporučujeme vám, abyste je používali každý den a od rána do večera. To vám pomůže si na ně zvyknout.



UPOZORNĚNÍ

Je důležité, abyste si pozorně prostudovali celou tuto uživatelskou příručku a příručku věnovanou bezpečnosti. Dodržujte bezpečnostní informace, abyste zabránili škodám nebo poškození zdraví.

Vaše sluchadla



Tato uživatelská příručka popisuje volitelné funkce, jimiž mohou, ale nemusejí být vaše sluchadla vybavena.

Obrat'te se na svého foniatra, aby označil funkce, které jsou pro vaše sluchadla v platnosti.

Typ sluchadla

Vaše sluchadla jsou uživatelsky upraveným modelem, který byl individuálně vyroben na základě anatomie vašeho ucha. Vkládají se přímo do uší, buď do ucha nebo hluboko dovnitř ušního kanálu. Nejsou určena pro děti mladší než 3 roky nebo pro osoby, jejichž vývojový věk nedosahuje 3 let.

Funkce bezdrátové komunikace umožňuje využívat pokročilé audiologické funkce a synchronizaci mezi vašimi sluchadly.

Vaše sluchadlo je vybaveno technologií Bluetooth® low energy* Technologie umožňující snadnou výměnu dat s vaším chytrým telefonem a bezproblémový streaming audiosignálu s vaším přístrojem iPhone**.

* Vlastníkem slovní značky a loga Bluetooth je firma Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem tohoto produktu z hlediska právních norem spadá pod licenční ujednání. Ostatní obchodní známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných společností.

** iPad, iPhone a iPod touch jsou obchodní známky firmy Apple Inc., které jsou registrovány v USA a v jiných zemích.

Seznamte se se svými sluchadly

Doporučujeme Vám, abyste se se svými novými sluchadly důkladně seznámili. Vezměte sluchadla do rukou a zkuste si používat ovládací prvky, abyste si povšimli, kde se na sluchadlech nacházejí. Tímto způsobem si usnadníte obsluhu ovládacích prvků, až budete mít sluchadla nasazena.




Jestliže máte problémy se stisknutím ovládacích prvků na sluchadlech, když je máte nasazena, můžete pro ovládání svých sluchadel použít aplikaci pro chytrý telefon.

Součásti a názvy

Tato uživatelská příručka popisuje několik typů sluchadel. Abyste identifikovali typ sluchadel, který používáte, podívejte se na následující obrázky.


Mějte na paměti, že umístění tlačítka a ventilace jsou na vašem sluchadle individuální, aby co nejlépe odpovídala vašemu uchu. Vzhled vašich sluchadel se proto může lišit od zde uvedených obrázků.

ITC (In The Canal)

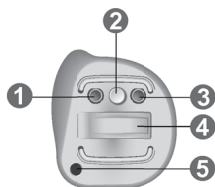

- 1 Mikrofon
 - 2 Tlačítko
 - 3 Druhý mikrofon
 - 4 Příhrádka pro baterii
 - 5 Odvětrání (volitelné)
-

ITE (In The Ear)

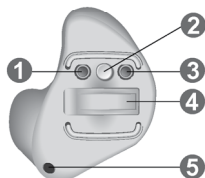

- 1 Mikrofon
 - 2 Tlačítko
 - 3 Druhý mikrofon
 - 4 Příhrádka pro baterii
 - 5 Odvětrání (volitelné)
-

Ovládací prvky

Pomocí tlačítka můžete například přepínat naslouchací programy. Požadované funkce tlačítka naprogramoval váš foniatr.



Pro dálkové ovládání můžete používat aplikaci pro smartphony.

Funkce tlačítka	L	R
Krátké stisknutí:		
Program nahoru	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Streaming TV zap./vyp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stiskněte po dobu asi 2 sekundy:		
Program nahoru	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Streaming TV zap./vyp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktivování/deaktivování režimu „v letadle“	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stiskněte tlačítko na déle než 3 sekundy:		
Pohotovost/zapnuto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = levá strana, R = pravá strana

Naslouchací programy

1

2

3

4

5

6

Více se můžete dočíst v kapitole:
„Změna naslouchacího programu“.

Vlastnosti

- Zpoždění při zapínání** vám umožňuje si nasazovat sluchadla, aniž by pískala.

Více se můžete dočíst v kapitole:
„Zapínání a vypínání“.

- Terapeutická funkce Tinnitus** (potlačení hučení) generuje zvuk, abyste byli odvedeni od vašich hučivých zvuků.

Baterie

Když je baterie vybitá, zvuk zeslábne a uslyšíte signál, jímž budete na tuto situaci upozorněni. Typ baterie bude rozhodovat o tom, v jakých intervalech budete muset baterii vyměňovat.

Velikost baterie a rady týkající se zacházení

Pokud budete potřebovat doporučené baterie, obraťte se na svého foniatra.


Velikost baterie:	312
-------------------	-----

- Pro svá sluchadla vždy používejte baterie správné velikosti.
- Pokud máte v úmyslu po několik dní svá sluchadla nepoužívat, vyjměte baterie.
- Vždy mějte s sebou náhradní baterie.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte a při jejich likvidaci dodržujte lokální pravidla pro recyklaci.

Výměna baterií


Vyjmutí baterie:

- ▶ Otevřete oddělení pro baterii.
- ▶ Rukou vyjměte baterii.

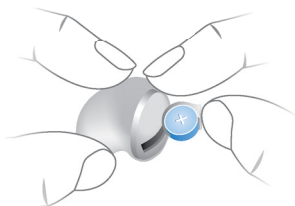

Založení baterie:

- ▶ Pokud má baterie ochrannou vrstvu, odstraňte ji jedině tehdy, když jste připraveni baterii použít.
- ▶ Baterii zasuňte tak, aby byl symbol „+“ obrácen směrem nahoru.

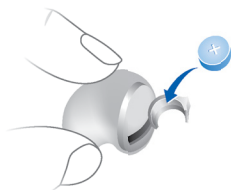

- ▶ Oddělení pro baterii opatrně uzavřete. Pokud cítíte odpor, baterie nebyla založena správně.

Nepokoušejte se zavřít přihrádku pro baterii silou.
Mohla by se poškodit.

Každodenní použití

Zapínání a vypínání

Máte následující možnosti, jak můžete sluchadla zapnout nebo vypnout.

Prostřednictvím přihrádky baterie:

- ▶ Zapínání: Přihrádku pro baterii uzavřete.
Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.
- ▶ Vypínání: Přihrádku pro baterii úplně otevřete.

Prostřednictvím tlačítka:

- ▶ Zapnutí nebo vypnutí: Tlačítko stiskněte a podržte je stisknuté po několik sekund. Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků.
Po zapnutí se nastaví **posledně** používaná hlasitost a nastavený naslouchací program.

Když používáte sluchadla, můžete být pomocí nastavitelného výstražného tónu upozorňováni, když je sluchadlo zapnuto nebo vypnuto.

Když je aktivována funkce **zpoždění při zapínání**, sluchadlo se zapne až poté, co uplyne prodleva v délce několika sekund. Během této doby si můžete sluchadla

vložit do uší, aniž byste slyšeli nepříjemné pískání způsobené zpětnou vazbou.

Funkci „zpoždění při zapínání“ Vám může aktivovat Váš foniatr.

Vkládání a vyjímání sluchadel


Vaše sluchadla jsou jemně vyladěna pro vaše pravé a levé ucho. Značky na sluchadlech označují stranu, pro kterou je sluchadlo určeno:

- „R“ = pravé ucho
- „L“ = levé ucho

Vkládání sluchadla:

- ▶ Sluchadlo opatrně vložte do ušního kanálu.
- ▶ Mírně je pootočte, aby bylo dobře usazeno.

Otevřete a zavřete svá ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu.

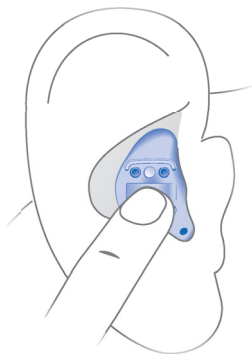


Vyjímání sluchadla



POZNÁMKA

Když sluchadlo vyjímáte z ucha, nikdy netahejte za kryt přihrádky baterie. Vaše sluchadlo by se tím mohlo poškodit.

- ▶ Lehce zatáhněte za zadní okraj svého ucha, abyste sluchadlo uvolnili.
- ▶ Dvěma prsty uchopte sluchadlo v ušním kanálu a opatrně je vytáhněte.

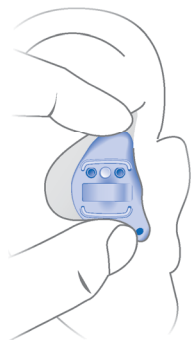

Po použití sluchadla vyčistěte a vysušte. Další informace si přečtěte v kapitole „Údržba a péče“.

Nastavení hlasitosti

Vaše sluchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu.

- ▶ Jestliže dáváte přednost manuálnímu nastavování hlasitosti, stiskněte tlačítko.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení vašeho tlačítka.

Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni akustickým signálem (volitelné).

Změna naslouchacího programu

V závislosti na akustické situaci sluchadla automaticky nastavují svůj výstup.

Vaše sluchadla mohou mít také několik naslouchacích programů, které vám umožňují podle potřeby změnit parametry zvuku. Na změnu programu můžete být upozorněni tónovým signálem (volitelné).

- ▶ Pokud chcete změnit naslouchací program, krátce stiskněte tlačítko.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků. Nahlédněte do kapitoly „Naslouchací programy“, kde naleznete seznam svých naslouchacích programů.

Je použito předdefinované nastavení hlasitosti.

Další nastavení (volitelné)

Prvky, kterými se ovládají sluchadla, můžete použít rovněž pro změny nastavení jiných parametrů, například úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus).

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků.

Speciální poslechové situace

Telefonování

Když telefonujete, mírně přijímač pootočte, aby nezakrýval vaše ucho úplně.



Program pro telefonování

Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování.

- ▶ Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování.

Pokud je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, je to uvedeno v kapitole „Naslouchací programy“.

Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu

Vaše sluchadla jsou **vyrobena pro iPhone**. To znamená, že do svých sluchadel můžete přímo z iPhoneu přenášet jak telefonní hovory, tak i třeba hudbu.

Pokud budete potřebovat další informace o kompatibilních přístrojích iOS a o ostatních užitečných funkcích, obraťte se na svého foniatra.

Režim „v letadle“

V oblastech, kde je použití technologie Bluetooth zakázáno (např. v některých letadlech) můžete aktivovat režim „v letadle“. Tím se modul Bluetooth ve vašich sluchadlech dočasně vypne. Sluchadla i nadále fungují bez modulu Bluetooth, avšak přímý streaming audiosignálu nebude možný a ani ostatní funkce nebudou k dispozici.

- ▶ Pokud si přejete režim „v letadle“ aktivovat nebo deaktivovat, použijte aplikaci pro chytrý telefon nebo použijte ovládací prvky vašich sluchadel.

Pokud budete potřebovat další informace, viz kapitola „Ovládací prvky“.

Když je režim „v letadle“ aktivován nebo deaktivován, ozve se výstražný akustický signál.

Údržba a péče

Aby se zabránilo poškození, je důležité o sluchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, která se brzy stanou běžnými činnostmi, které provádíte každý den.

Naslouchací přístroje


Sušení a skladování

- ▶ Přes noc svá sluchadla vysušte.
- ▶ V případě déletrvajících období, kdy se sluchadla nepoužívají, je skladujte s otevřenou přihrádkou pro baterii a s vyjmutými bateriemi v suchém prostředí.
- ▶ Pokud budete potřebovat další informace, zeptejte se svého foniatra.

Čištění

Sluchadla čistěte každý den, aby zůstala zachována jejich funkce a z hygienických důvodů.

- ▶ Každý den sluchadla očistěte měkkým suchým hadříkem.
- ▶ Vaše sluchadla mohou mít ochrannou vložku proti ušnímu mazu. Zabraňuje pronikání ušního mazu. Při čištění sluchadel dávejte pozor, abyste ochrannou vložku proti ušnímu mazu nepoškodili.

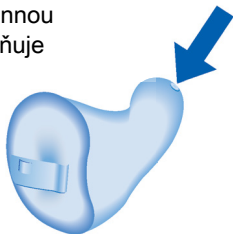

- ▶ Nikdy nepoužívejte tekoucí vodu a nikdy sluchadla neponořujte do vody.
- ▶ Při čištění sluchadla nevystavujte tlaku.
- ▶ Požádejte svého foniatra o doporučené čisticí prostředky, speciální soupravu pro ošetřování nebo o další informace o tom, jak udržet svá sluchadla v dobrém stavu.



Profesionální údržba

Důkladné profesionální čištění a údržbu může uskutečnit váš foniatr.

Pokud potřebuje vyměnit ochranná vložka proti ušnímu mazu nebo ochranná krytka mikrofonu , měli byste se obrátit na odborníka.

Požádejte svého foniatra, aby vám poskytl individuální doporučení týkající se intervalů údržby a podpory.

Další informace

Bezpečnostní informace

Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace, nahlédněte do příručky věnované bezpečnosti, která je dodávána spolu s vašimi sluchadly.

Příslušenství

Typ dostupného příslušenství závisí na typu sluchadla. Například: streamer pro audio data nebo aplikace pro chytré telefony pro dálkové ovládání.

Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na svého foniatra.

Symboly použité v tomto dokumentu



Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví.



Upozorňuje na hrozící hmotné škody.



Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe.

Označení



„Made for iPhone“,

„Made for iPad“ a „Made for iPod“ znamenají, že toto elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPhonu, iPadu, nebo iPodu a že firma, která je vyvinula, prohlašuje, že splňuje výkonové normy firmy Apple. Firma Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení a ani za to, že splňuje bezpečnostní normy a úřední nařízení. Mějte prosím na paměti, že použití tohoto příslušenství s jednotkami iPhone, iPad nebo iPod může mít nepříznivý vliv na výkon bezdrátové komunikace.

Odstraňování potíží

Problém a možná řešení

Zvuk je slabý.

- Zvyšte hlasitost.
 - Oddělení pro baterii pečlivě a důkladně uzavřete.
 - Sluchadlo vyčistěte.
 - Vyměňte vybitou baterii.
 - Požádejte svého foniatra, aby vyměnil ochrannou vložku proti ušnímu mazu a/nebo krytku mikrofonu.
-

Sluchadlo vydává pískavé zvuky.

- Sluchadlo znovu zasuňte, aby bezpečně zapadlo na své místo.
 - Snižte hlasitost.
 - Sluchadlo vyčistěte.
-

Zvuk je zkreslený.

- Snižte hlasitost.
 - Vyměňte vybitou baterii.
 - Sluchadlo vyčistěte.
 - Požádejte svého foniatra, aby vyměnil ochrannou vložku proti ušnímu mazu a/nebo krytku mikrofonu.
-

Sluchadlo vydává tónový signál.

- Vyměňte vybitou baterii.
-

Problém a možná řešení

Sluchadlo nefunguje.

- Sluchadlo zapněte.
 - Oddělení pro baterii pečlivě a důkladně uzavřete.
 - Vyměňte vybitou baterii.
 - Ujistěte se, že baterie je instalována správně.
 - Je aktivní zpožděné zapínání.
Počkejte několik sekund a zkontrolujte to znovu.
-

Pokud se budete potýkat s jakýmkoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra.

Specifické informace pro danou zemi

USA a Kanada

Informace o certifikaci pro sluchadla s funkcí pro bezdrátovou komunikaci:

Insio Nx ITC, Insio Nx ITE

- HVIN: WP4N1
- Obsahuje FCC ID: SGI-RFM001
- IC: 267AB-WP4N1

Servis a záruka

Výrobní čísla

Vlevo:

Vpravo:

Data servisních úkonů

1: _____ 4: _____

2: _____ 5: _____

3: _____ 6: _____

Záruka

Datum zakoupení:

Záruční doba v měsících:

Váš foniatr

 **Výrobce z hlediska právních norem**

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Německo
Tel.: +49 9131 308 0

Distributor

Sivantos s.r.o.
Molákova 576/11
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 257 328 161
Email: sluchadla.cz@sivantos.com

Dokument č. 03638-99T01-2D00 CS
Poslední revize 02/06/2018
©Signia GmbH, 07/2018.
Všechna práva vyhrazena.


0123

www.signia-sluchadla.cz

Zvukovodová sluchadla

Insio Nx CIC, Insio Nx IIC

Uživatelská příručka



Obsah

Vítejte	4
<hr/>	
Vaše sluchadla	5
<hr/>	
Typ sluchadla	5
Seznamte se se svými sluchadly	5
Součásti a názvy	6
Ovládací prvky	7
Naslouchací programy	8
Vlastnosti	9
Baterie	10
<hr/>	
Velikost baterie a rady týkající se zacházení	10
Výměna baterií	11
Každodenní použití	12
<hr/>	
Zapínání a vypínání	12
Vkládání a vyjímání sluchadel	13
Nastavení hlasitosti	14
Změna naslouchacího programu	15
Další nastavení (volitelné)	15
Speciální poslechové situace	16
<hr/>	
Telefonování	16

Údržba a péče	17
Naslouchací přístroje	17
Profesionální údržba	18
Další informace	19
Bezpečnostní informace	19
Bezdrátové ovládání	19
Příslušenství	19
Symboly použité v tomto dokumentu	20
Odstraňování potíží	20
Specifické informace pro danou zemi	22
Servis a záruka	23

Vítejte

Děkujeme vám, že jste si vybrali naše sluchadla, aby vás doprovázela vašim každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového vám bude chvíli trvat, než se s nimi seznámíte.

Tato příručka spolu s podporou vašeho foniatra Vám pomohou pochopit výhody a vyšší kvalitu života, kterou vám sluchadla nabízejí.

Aby vám sluchadla poskytla maximální přínos, doporučujeme vám, abyste je používali každý den a od rána do večera. To vám pomůže si na ně zvyknout.



UPOZORNĚNÍ

Je důležité, abyste si pozorně prostudovali celou tuto uživatelskou příručku a příručku věnovanou bezpečnosti. Dodržujte bezpečnostní informace, abyste zabránili škodám nebo poškození zdraví.

Vaše sluchadla

i

Tato uživatelská příručka popisuje volitelné funkce, jimiž mohou, ale nemusí být vaše sluchadla vybavena.

Obrat'te se na svého foniatra, aby označil funkce, které jsou pro vaše sluchadla v platnosti.

Typ sluchadla

Vaše sluchadla jsou uživatelsky upraveným modelem, který byl individuálně vyroben na základě anatomie vašeho ucha. Vkládají se přímo do uší, buď do ucha nebo hluboko dovnitř ušního kanálu. Nejsou určena pro děti mladší než 3 roky nebo pro osoby, jejichž vývojový věk nedosahuje 3 let.

Seznamte se se svými sluchadly

Doporučujeme Vám, abyste se se svými novými sluchadly důkladně seznámili. Vezměte sluchadla do rukou a zkuste si používat ovládací prvky, abyste si povšimli, kde se na sluchadlech nacházejí. Tímto způsobem si usnadníte obsluhu ovládacích prvků, až budete mít sluchadla nasazena.

i


Jestliže máte problémy se stisknutím ovládacích prvků na sluchadlech, když je máte nasazena, můžete pro ovládání svých sluchadel používat dálkové ovládání. Pomocí speciální aplikace pro chytré telefony máte k dispozici ještě další možnosti nastavení parametrů.

Součásti a názvy

Tato uživatelská příručka popisuje několik typů sluchadel. Abyste identifikovali typ sluchadel, který používáte, podívejte se na následující obrázky.


Mějte na paměti, že umístění tlačítka a ventilace jsou na vašem sluchadle individuální, aby co nejlépe odpovídala vašemu uchu. Vzhled vašich sluchadel se proto může lišit od zde uvedených obrázků.

CIC

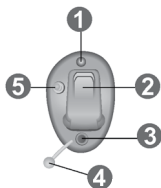

- 1 Mikrofon
 - 2 Příhrádka pro baterii
(s tlačítkem (volitelná funkce))
 - 3 Odvětrání (volitelný doplněk)
 - 4 Šňůrka pro vyjímání
 - 5 Tlačítko (volitelný doplněk)
-

IIC

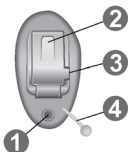

- 1 Odvětrání (volitelné)
 - 2 Oddělení pro baterii
 - 3 Mikrofon
 - 4 Šňůrka pro vyjímání
-

Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků můžete například nastavovat hlasitost nebo přepínat naslouchací programy. Vaše sluchadla mají buď tlačítko, přihrádku pro baterii, která funguje také jako tlačítko, nebo žádné tlačítko nemají.

Požadované funkce ovládacích prvků naprogramoval váš foniatr.

Ovládání	Levé	Pravé
Tlačítko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Přihrádka pro baterii fungující jako tlačítko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Žádné tlačítko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Zeptejte se také svého foniatra, zda je pro ovládání vašich sluchadel k dispozici také dálkové ovládání nebo aplikace pro chytré telefony.

Funkce tlačítka	L	R
Krátké stisknutí:		
Změna programu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dlouhé stisknutí:		
Pohotovost/zapnuto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = levá strana, R = pravá strana

Naslouchací programy

1

2

3

4

5

6

Více se můžete dočíst v kapitole:
 „Změna naslouchacího programu“.

Vlastnosti

- Zpoždění při zapínání** vám umožňuje si nasazovat sluchadla, aniž by pískala.

Více se můžete dočíst v kapitole:
„Zapínání a vypínání“.

- Terapeutická funkce Tinnitus** (potlačení hučení) generuje zvuk, abyste byli odvedeni od vašich hučivých zvuků.

- Funkce **e2e wireless** umožňuje současné ovládání obou sluchadel.

Více se můžete dočíst v kapitole:
„Bezdrátové ovládání“.

Baterie

Když je baterie vybitá, zvuk zeslábne a uslyšíte signál, jímž budete na tuto situaci upozorněni. Typ baterie bude rozhodovat o tom, v jakých intervalech budete muset baterii vyměňovat.

Velikost baterie a rady týkající se zacházení

Pokud budete potřebovat doporučené baterie, obraťte se na svého foniatra.


Velikost baterie:	10
-------------------	----

- Pro svá sluchadla vždy používejte baterie správné velikosti.
- Pokud máte v úmyslu po několik dní svá sluchadla nepoužívat, vyjměte baterie.
- Vždy mějte s sebou náhradní baterie.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte a při jejich likvidaci dodržujte lokální pravidla pro recyklaci.

Výměna baterií


Vyjmutí baterie:

- ▶ Otevřete oddělení pro baterii.
- ▶ Rukou vyjměte baterii.

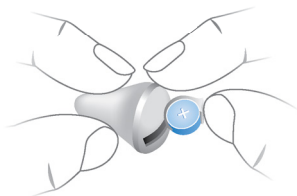

Založení baterie:

- ▶ Pokud má baterie ochrannou vrstvu, odstraňte ji jedině tehdy, když jste připraveni baterii použít.
- ▶ Baterii zasuňte tak, aby byl symbol „+“ obrácen směrem nahoru.

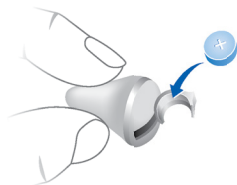

- ▶ Oddělení pro baterii opatrně uzavřete. Pokud cítíte odpor, baterie nebyla založena správně.

Nepokoušejte se zavřít oddělení pro baterii silou. Mohlo by se poškodit.

Každodenní použití

Zapínání a vypínání

Máte následující možnosti, jak můžete sluchadla zapnout nebo vypnout.

Prostřednictvím přihrádky baterie:

- ▶ Zapínání: Přihrádku pro baterii uzavřete.
Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.
- ▶ Vypínání: Přihrádku pro baterii úplně otevřete.

Prostřednictvím tlačítka:

- ▶ Zapnutí nebo vypnutí: Tlačítko stiskněte a podržte je stisknuté po několik sekund. Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků.

Po zapnutí se nastaví **posledně** používaná hlasitost a nastavený naslouchací program.

Když používáte sluchadla, můžete být pomocí nastavitelného výstražného tónu upozorňováni, když je sluchadlo zapnuto nebo vypnuto.

Když je aktivována funkce **zpoždění při zapínání**, sluchadlo se zapne až poté, co uplyne prodleva v délce několika sekund. Během této doby si můžete sluchadla vložit do uší, aniž byste slyšeli nepříjemné pískání způsobené zpětnou vazbou.

Funkci „zpoždění při zapínání“ Vám může aktivovat Váš foniatr.

Vkládání a vyjímání sluchadel

Vaše sluchadla jsou jemně vyladěna pro vaše pravé a levé ucho. Značky na sluchadlech nebo barvy na sluchadlech označují stranu, pro kterou je sluchadlo určeno:


- červená nebo značka „R“ = pravé ucho
- modrá nebo značka „L“ = levé ucho

Vkládání sluchadla:

- ▶ Sluchadlo opatrně vložte do ušního kanálu. Věnujte zvláštní pozornost šňůrce označující spodní konec.

- ▶ Mírně ji pootočte, aby byla dobře usazena.

Otevřete a zavřete svá ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu.

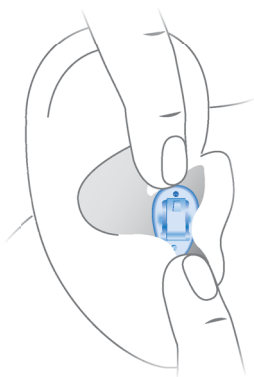

i

- Může být pohodlné vkládat **pravé** sluchadlo do ucha **pravou** rukou a **levé** sluchadlo **levou** rukou.
- Pokud máte při zasouvání ušní koncovky problémy, pomocí druhé ruky jemně stáhněte ušní boltec směrem dolů. Tím se ušní kanál otevře a zasunutí ušní koncovky bude snazší.

Vyjímání sluchadla:



POZNÁMKA

Když sluchadlo vyjímáte z ucha, nikdy netahejte za kryt přihrádky baterie. Vaše sluchadlo by se tím mohlo poškodit.

- ▶ Lehce zatáhněte za zadní okraj svého ucha, abyste sluchadlo uvolnili.
- ▶ Sluchadlo vyjměte zatažením za šňůrku pro vyjímání směrem k zadní části hlavy.

Po použití sluchadla vyčistěte a vysušte. Další informace si přečtete v kapitole „Údržba a péče“.

Nastavení hlasitosti

Vaše sluchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu.

- ▶ Jestliže dáváte přednost manuálnímu nastavování hlasitosti, stiskněte tlačítko.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení vašeho tlačítka.

Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni akustickým signálem (volitelné).

Změna naslouchacího programu

V závislosti na akustické situaci sluchadla automaticky nastavují svůj výstup.

Vaše sluchadla mohou mít také několik naslouchacích programů, které vám umožňují podle potřeby změnit parametry zvuku. Na změnu programu můžete být upozorněni tónovým signálem (volitelné).

- ▶ Pokud chcete změnit naslouchací program, krátce stiskněte tlačítko.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků. Nahlédněte do kapitoly „Naslouchací programy“, kde naleznete seznam svých naslouchacích programů.

Je použito předdefinované nastavení hlasitosti.

Další nastavení (volitelné)

Prvky, kterými se ovládají sluchadla, můžete použít rovněž pro změny nastavení jiných parametrů, například úroveň terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus).

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků.

Speciální poslechové situace

Telefonování

Když telefonujete, mírně přijímač pootočte, aby nezakrýval vaše ucho úplně.



Program pro telefonování

Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování.

- ▶ Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování.

Pokud je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, je to uvedeno v kapitole „Naslouchací programy“.

Údržba a péče

Aby se zabránilo poškození, je důležité o sluchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, která se brzy stanou běžnými činnostmi, které provádíte každý den.

Naslouchací přístroje


Sušení a skladování

- ▶ Přes noc svá sluchadla vysušte.
- ▶ V případě déletrvajících období, kdy se sluchadla nepoužívají, je skladujte s otevřenou přihrádkou pro baterii a s vyjmutými bateriemi v suchém prostředí.
- ▶ Pokud budete potřebovat další informace, zeptejte se svého foniatra.

Čištění

Sluchadla čistěte každý den, aby zůstala zachována jejich funkce a z hygienických důvodů.

- ▶ Každý den sluchadla očistěte měkkým suchým hadříkem.
- ▶ Vaše sluchadla mohou mít ochrannou vložku proti ušnímu mazu. Zabraňuje pronikání ušního mazu. Při čištění sluchadel dávejte pozor, abyste ochrannou vložku proti ušnímu mazu nepoškodili.

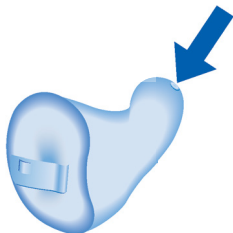

- ▶ Nikdy nepoužívejte tekoucí vodu a nikdy sluchadla neponořujte do vody.
- ▶ Při čištění sluchadla nevystavujte tlaku.
- ▶ Požádejte svého foniatra o doporučené čisticí prostředky, speciální soupravu pro ošetřování nebo o další informace o tom, jak udržet svá sluchadla v dobrém stavu.



Profesionální údržba

Důkladné profesionální čištění a údržbu může uskutečnit váš foniatr.

Pokud potřebuje vyměnit ochranná vložka proti ušnímu mazu nebo ochranná krytka mikrofonu, měli byste se obrátit na odborníka.

Požádejte svého foniatra, aby vám poskytl individuální doporučení týkající se intervalů údržby a podpory.

Další informace

Bezpečnostní informace

Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace, nahlédněte do příručky věnované bezpečnosti, která je dodávána spolu s vašimi sluchadly.

Bezdrátové ovládání

Vaše sluchadla mohou být vybavena funkcí bezdrátového ovládání. To zajišťuje synchronizaci mezi dvěma sluchadly:

- Změníte-li program nebo hlasitost u jednoho sluchadlového systému, druhý systém se automaticky upraví také.
- Obě sluchadla současně se automaticky upraví podle poslechové situace.

Pokud budete potřebovat zjistit, zda jsou vaše sluchadla vybavena funkcí pro bezdrátovou komunikaci, nahlédněte do kapitoly „Vlastnosti“.

Příslušenství

Typ dostupného příslušenství závisí na typu sluchadla. Například dálkové ovládání, streamer pro audio data nebo aplikace pro smartphone pro dálkové ovládání.

Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na svého foniatra.

Symbole použité v tomto dokumentu



Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví.



Upozorňuje na hrozící hmotné škody.



Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe.

Odstraňování potíží

Problém a možná řešení

Zvuk je slabý.

- Zvyšte hlasitost.
 - Oddělení pro baterii pečlivě a důkladně uzavřete.
 - Sluchadlo vyčistěte.
 - Vyměňte vybitou baterii.
 - Požádejte svého foniatra, aby vyměnil ochrannou vložku proti ušnímu mazu a/nebo krytku mikrofonu.
-

Sluchadlo vydává pískavé zvuky.

- Sluchadlo znovu zasuňte, aby bezpečně zapadlo na své místo.
 - Snižte hlasitost.
 - Sluchadlo vyčistěte.
-

Problém a možná řešení

Zvuk je zkreslený.

- Snižte hlasitost.
 - Vyměňte vybitou baterii.
 - Sluchadlo vyčistěte.
 - Požádejte svého foniatra, aby vyměnil ochrannou vložku proti ušnímu mazu a/nebo krytku mikrofonu.
-

Sluchadlo vydává tónový signál.

- Vyměňte vybitou baterii.
-

Sluchadlo nefunguje.

- Sluchadlo zapněte.
 - Oddělení pro baterii pečlivě a důkladně uzavřete.
 - Vyměňte vybitou baterii.
 - Ujistěte se, že baterie je instalována správně.
 - Je aktivní zpožděné zapínání. Počkejte několik sekund a zkontrolujte to znovu.
-

Pokud se budete potýkat s jakýmkoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra.

Specifické informace pro danou zemi

USA a Kanada

Informace o certifikaci pro sluchadla s funkcí pro bezdrátovou komunikaci:

Insio Nx CIC, Insio Nx IIC

- Obsahuje FCC ID: SGI-MIM001
- IC: 267AB-WP4N2

Servis a záruka

Výrobní čísla

Vlevo:

Vpravo:

Data servisních úkonů

1: _____ 4: _____

2: _____ 5: _____

3: _____ 6: _____

Záruka

Datum zakoupení:

Záruční doba v měsících:

Váš foniatr



Výrobce z hlediska právních norem

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Německo
Tel.: +49 9131 308 0

Distributor:
Sivantos s.r.o.
Molákova 576/11
186 00 Praha 8

Dokument č. 03429-99T02-2D00
Datum poslední revize: 04.2018
© 05.2018, Signia GmbH. All rights reserved

