

SIEMENS



Sivantos GmbH je držitelem licence pro použití
ochranné známky Siemens AG.

Sivantos s.r.o.

Molákova 576/11
186 00 Praha 8 Karlín
Česká republika

Tel.: 257 328 161

E-mail: sluchadla.cz@sivantos.com



Závěsná sluchadla

Údržba a čištění

www.bestsound-technology.cz



Závěsná sluchadla

Závěsná sluchadla se nosí zavěšena za ušním boltcem. Zvuk je veden do zvukovodu pružnou hadičkou, která je napojena na hák sluchadla. Hádčička je zakončena ušní tvarovkou individuálně zhotovenou podle přesného otisku ucha. Tato tvarovka se velkou měrou podílí na kvalitě poslechu.

Vaše spokojenost při používání sluchadla z velké míry závisí na tom, jak dobře sluchadlo, resp. tvarovka v uchu sedí a jak dobře se o sluchadlo staráte.

Sluchadla jsou drahá a citlivá zařízení, která vyžadují určitou opatrnost při manipulaci a především správnou údržbu. Pokud se budete řídit těmito radami a pokyny, bude Vám sluchadlo co nejdéle dobře sloužit.

Na co si dát pozor

Sluchadlo je citlivé na extrémní horko (nikdy jej neponechávejte na přímém slunci, např. v automobilu), vysokou vlhkost, silná magnetická pole, rentgenové záření a mechanické namáhání.

Kdy sluchadlo odložit

- při sprchování a koupání, plavání,
- při mytí a vysoušení vlasů fénem,
- při použití laku na vlasy,
- pokud budete vystaveni silnějšímu magnetickému, vysokofrekvenčnímu nebo rentgenovému záření.

Pokud sluchadlo není v provozu, vždy jej vypínejte, šetříte tak baterii.

Jestliže nebudete sluchadlo delší dobu nosit, vyjměte z něj baterii a uložte do pouzdra z dosahu dětí a domácích zvířat.

Baterie mohou vytékat. Zjistíte-li, že baterie teče, nahrad'te ji ihned za novou.

Péče o sluchadlo

1 Čištění sluchadel a ušních tvarovek provádějte pravidelně, aby se zabránilo jejich poškození.

2 Sluchadlo čistěte suchým měkkým hadříkem.

3 Na noc ukládejte sluchadlo do „vysoušecího pouzdra“ spolu se speciální sušící tabletou, která pohlcuje vlhkost. Aby bylo vysoušení opravdu účinné, je třeba používat sušící tabletu každý den.


4 Ušní tvarovku kontrolujte a čistěte pravidelně. Ušní maz a vlhkost je příčinou mnoha problémů. Může dojít k ucpání a zablokování přenosu zvuku.



Před čištěním odpojte tvarovku s hadičkou od sluchadla.



Tvarovku ponořte do nádobky s vlažnou vodou a speciální čistící a dezinfekční tabletou. K čištění můžete použít i mýdlovou vodu nebo vodu s trochou saponátu na nádobí. Ponechteje asi 15 minut, aby se uvolnil ušní maz a všechna nečistota.

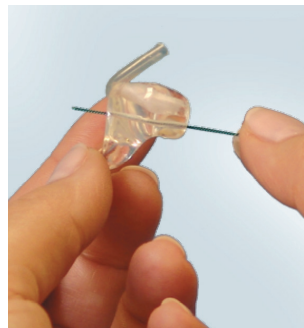

Pokud se ušní maz zcela neuvolní, dočistěte tvarovku tyčinkou se štětečkem, kterou zakoupíte u svého sluchadlového specialisty. Nikdy nepoužívejte k čištění jehlu, párátko a podobné špičaté předměty.



Tvarovku opláchněte pod vlažnou tekoucí vodou. Osušte tvarovku hadříkem, hadičku a event. odvětrávací kanálek profoukněte speciálním balónkem. Než nasadíte tvarovku s hadičkou na hák sluchadla, musí být dokonale suché.

5 Kontrolujte, zda je hadička měkká a poddajná. Pokud je hadička stará a ztvrdlá, nechte si ji vyměnit v odborném servisu. Stará hadička může být příčinou pískání sluchadla.

Do mikrofonních otvorů nikdy nic nezasouvejte. Čištění mikrofonů ponechejte na odborníkovi. Sluchadlo dejte pravidelně jednou za čtvrt roku ke kontrole a k vyčištění do odborného servisu.

Sluchadlo zde nejen vyčistí, ale zkontrolují, zda fungují všechny funkce (ovládací prvky) správně.

Sluchadlo s hadičkou LIFE

Hadičku Life pravidelně kontrolujte, aby byla vždy čistá. V případě potřeby čistěte pomocí čistícího drátku.

Koncovku Life odpojte od hadičky, opláchněte ve vodě s několika kapkami saponátu na nádobí a poté ve vlažné tekoucí vodě a pečlivě vysušte. Nasadte opět na hadičku Life.

Hadičku a koncovku Life měňte každé 3–6 měsíců, event. dle potřeby.

