

### Návod k Vašemu novému sluchadlu SIEMENS

Blahopřejeme! Rozhodli jste se ve prospěch nového kapesního sluchadla Siemens. Učinili jste tak důležitý krok k tomu, abyste znovu dobře slyšeli a především dobře rozuměli.

Vaše nové sluchadlo se stane Vaším stálým průvodcem. Bude proto tedy potřeba nějaký čas k tomu, abyste se seznámili a osvojili si určité dovednosti při manipulaci a obsluze. Věříme, že s trochou trpělivosti Vám bude Vaše sluchadlo Siemens příjemným společníkem.

### Jak zacházet se sluchadlem

#### Připojení sluchátka a šňůrky ke sluchadlu

- Zapojte 2-kolíkovou vidlici na jednom konci šňůry do sluchátka.
- Konektor na opačném konci šňůry zasuňte do zásuvky na sluchadle.

Jestliže používáte olivku:

- Stlačte sluchátko proti adaptéru a spojte je dohromady. Ušní adaptér je nyní připraven pro nasazení příslušné olivky.

Jestliže používáte ušní tvarovku:

- Na sluchátko nasadte přímo ušní tvarovku.

#### Manipulace s baterií

Typ baterie: tužková baterie

1. Palcem otevřete dvířka příhrádky baterie.
2. Vložte baterii. Dbejte na správnou polaritu baterie! Novou baterii vkládejte tak, aby strana označená (+) souhlasila s označením (+) uvnitř příhrádky baterie.
3. Příhrádku baterie lehce uzavřete jemným zaklapnutím dvířek.

#### Manipulace s vypínačem

Pozice I: zapnuto

Pozice 0: vypnuto

#### Nastavení hlasitosti

S regulátorem hlasitosti lze snadno docílit požadované hlasitosti jeho postupným otáčením z pozice (1) = minimum až na pozici maximální hlasitosti (6).

#### Audiovstup

K některým sluchadlům je možné připojit externí zdroj signálu přes speciální adaptér, tzv. audiobotičku. O možnostech se, prosím, informujte u Vašeho sluchadlového specialisty.

#### Pozor!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Na audiovstup připojujte pouze taková síťová zařízení, která splňují bezpečnostní požadavky stanovené v normě IEC 65/BS EN 600065.

**UPOZORNĚNÍ:** Ukládejte baterie mimo dosah dětí!

**Pozor!** Jestliže nebudete sluchadlo používat delší dobu, vyjměte z něj baterii. Baterie mohou vytékat. Zjistíte-li, že baterie teče, vyměňte ji ihned za novou.

### Několik užitečných rad:


- Nepoužívejte sluchadlo v následujících případech
  - při koupání a sprchování
  - při používání laku na vlasy
  - při vstupu do silného magnetického pole nebo vysokofrekvenčních pásem ( např. magnetoterapie a jiná lékařská aparatura )
  - při rentgenologickém vyšetření
- Chraňte sluchadlo před zmoknutím, vlhkem, vysokou teplotou a přímým sluncem (např. v automobilu).
- Zacházejte se svým sluchadlem opatrně a chraňte ho před pádem.
- K čištění sluchadla používejte čistý suchý či vlhký hadřík nebo hygienické kapesníčky.
- Ušní tvarovka popř. olivka se často zanáší ušním mazem. Je proto třeba pravidelně ji čistit!
- Pokud není sluchadlo v provozu, vždy jej vypínejte!
- Vybitou baterii ihned vyjměte. Baterie mohou vytékat.

**Pozor! Nepoužívejte sluchadlo v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu.**

### V případě nesprávné funkce sluchadla zkontrolujte nejdříve zda:

- je sluchadlo zapnuté
- je do přihrádky vložena baterie
- není již baterie vybitá
- je správně zavřena přihrádka baterie
- není olivka nebo ušní tvarovka ucpána ušním mazem

Ovládání - Siemens Pockettio™ je jednoduché a pohodlné na ovládání.

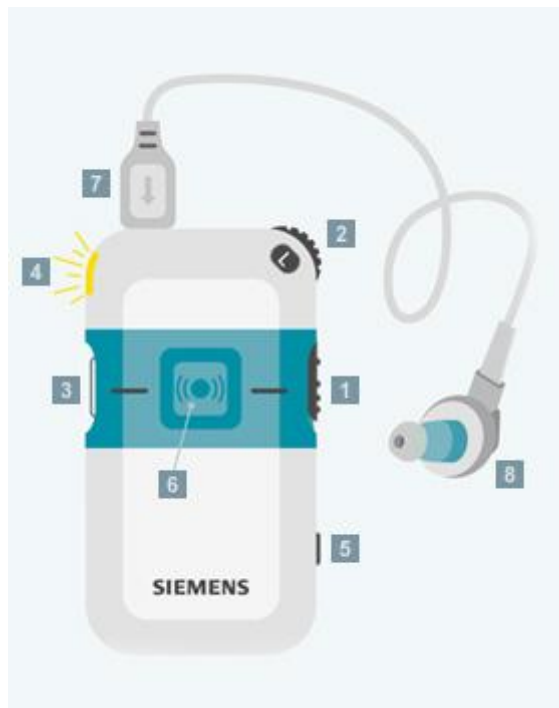

Všechny detaily:

1. ZAPNOUT/VYPNOUT tlačítko
2. Kontrolka hlasitosti s jasným značením navrchu a vepředu.
3. Dvířka baterie
4. \* LED indikátor
5. \* Audio input, zástrčka pro připojení k TV nebo jiným audio přístrojům
6. \* Tlačítko změny programu
7. Kabel sluchátka
8. Sluchátko s koncovkou


\* pouze u některých typů



Individuální změna hlasitosti s kontrolkou



Jednoduché ovládání dvířek baterie a vkládání baterie, dlouhá životnost baterie a možnost využití standardní baterie (AA).

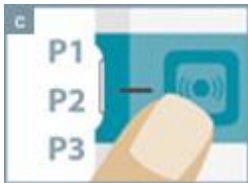

3 programy pro různé sluchové situace:

P1 pro porozumění řeči

P2 pro hlučné prostředí

P3 pro sluchový komfort

### Informace týkající se likvidace

V rámci Evropské unie se na toto zařízení vztahuje "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC z 27. ledna 2003 o elektrických a elektronických zařízeních, doplněná směrnicí 2003/108/EC" (WEEE).



#### POZNÁMKA

- ▶ Sluchadla, příslušenství a obaly recyklujte v souladu s národními předpisy.

Značkou CE firma Sivantos prohlašuje, že se toto zařízení shoduje s ustanoveními evropské směrnice 93/42/EEC týkající zdravotnických prostředků.



V případě produktů, v nichž je instalována funkce e2e wireless 2.0, firma Sivantos navíc ještě prohlašuje, že se dané zařízení shoduje s ustanoveními evropské směrnice 99/5/EC (R&TTE) týkající se koncových radiových a telekomunikačních zařízení.

#### Výrobce:

**Sivantos GmbH**  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlagen  
Germany

#### Prodej a servis:

**Sivantos s.r.o.**  
Molákova 576/11  
186 00, Praha 8 – Karlín  
Telefon: +420 257 328 161  
E-mail: sluchadla.cz@sivantos.com

Sivantos GmbH je držitelem licence pro použití ochranné známky Siemens AG.

[www.bestsound-technology.cz](http://www.bestsound-technology.cz)

Datum vydání: 03-2015