

signia

# Pure 312 X

Uživatelská příručka



Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

# Obsah

<b>Vítejte</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>Vaše sluchadla</b>	<b>5</b>
<hr/>	
Typ sluchadla	5
Seznamte se se svými sluchadly	6
Součásti a názvy	7
Ovládací prvky	9
Naslouchací programy	10
Vlastnosti	10
<b>Baterie</b>	<b>12</b>
<hr/>	
Velikost baterie a rady týkající se zacházení	12
Výměna baterií	13
<b>Každodenní použití</b>	<b>14</b>
<hr/>	
Zapínání a vypínání	14
Vkládání a vyjímání sluchadel	15
Nastavení hlasitosti	19
Změna naslouchacího programu	19
Další nastavení (volitelné)	20

<b>Speciální poslechové situace</b>	<b>21</b>
Telefonování	21
Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu	22
Režim „v letadle“	22
Indukční smyčky pro přenos audiosignálu (volitelný doplněk)	23
<b>Údržba a péče</b>	<b>25</b>
Naslouchací přístroje	25
Ušní koncovky	26
Profesionální údržba	28
<b>Další informace</b>	<b>29</b>
Bezpečnostní informace	29
Příslušenství	29
Symboly použité v tomto dokumentu	29
Odstraňování potíží	30
Specifické informace pro danou zemi	32
Servis a záruka	35

# Vítejte

Děkujeme vám, že jste si vybrali naše sluchadla, aby vás doprovázela vašim každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového vám bude chvíli trvat, než se s nimi seznámíte.

Tato příručka spolu s podporou vašeho foniatra Vám pomohou pochopit výhody a vyšší kvalitu života, kterou vám sluchadla nabízejí.

Aby vám sluchadla poskytla maximální přínos, doporučujeme vám, abyste je používali každý den a od rána do večera. To vám pomůže si na ně zvyknout.



## **UPOZORNĚNÍ**

Je důležité, abyste si pozorně prostudovali celou tuto uživatelskou příručku a příručku věnovanou bezpečnosti. Dodržujte bezpečnostní informace, abyste zabránili škodám nebo poškození zdraví.

# Vaše sluchadla



Tato uživatelská příručka popisuje volitelné funkce, jimiž mohou, ale nemusí být vaše sluchadla vybavena.

Obrat'te se na svého foniatra, aby označil funkce, které jsou pro vaše sluchadla v platnosti.

## Typ sluchadla

Vaše sluchadla jsou typu RIC (Receiver-in-Canal). Přijímač je umístěn v ušním kanálu a připojen ke sluchadlu pomocí kabelu přijímače. Tato sluchadla nejsou určena pro děti mladší než 3 roky nebo pro osoby, jejichž vývojový věk nedosahuje 3 let.

Funkce bezdrátové komunikace umožňuje využívat pokročilé audiologické funkce a synchronizaci mezi vašimi sluchadly.

Vaše sluchadlo je vybaveno technologií Bluetooth® low energy\* Technologie umožňující snadnou výměnu dat s vaším chytrým telefonem a bezproblémový streaming audiosignálu s vaším přístrojem iPhone\*\*.

\* Vlastníkem slovní značky a loga Bluetooth je firma Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem tohoto produktu z hlediska právních norem spadá pod licenční ujednání. Ostatní obchodní známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných společností.

\*\* iPad, iPhone a iPod touch jsou obchodní známky firmy Apple Inc., které jsou registrovány v USA a v jiných zemích.

## Seznamte se se svými sluchadly


Doporučujeme Vám, abyste se se svými novými sluchadly důkladně seznámili. Vezměte sluchadla do rukou a zkuste si používat ovládací prvky, abyste si povšimli, kde se na sluchadlech nacházejí. Tímto způsobem si usnadníte obsluhu ovládacích prvků, až budete mít sluchadla nasazena.

**i**

Jestliže máte problémy se stisknutím ovládacích prvků na sluchadlech, když je máte nasazena, můžete pro ovládání svých sluchadel používat dálkové ovládání. Pomocí speciální aplikace pro chytré telefony máte k dispozici ještě další možnosti nastavení parametrů.

## Součásti a názvy


Tato uživatelská příručka popisuje několik typů sluchadel. Abyste identifikovali typ sluchadel, který používáte, podívejte se na následující obrázky.

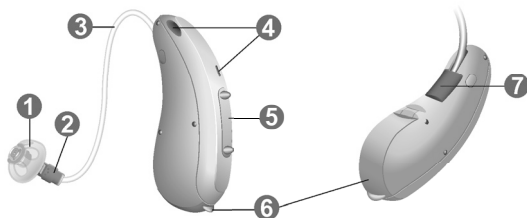



- 
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 Ušní koncovka                    | 6 Příkladka pro baterii<br>(spínač zapnuto/<br>vypnuto)                                    |
| 2 Receiver                         |  |
| 3 Kabel receiveru                  | 7 Označení strany<br>(červená = pravé ucho,<br>modrá = levé ucho) a<br>připojení receiveru |
| 4 Otvory mikrofonu                 |  |
| 5 Kolébkový přepínač<br>(ovládání) |  |
-

Můžete používat následující standardní ušní koncovky:

<b>Standardní ušní koncovky</b>	<b>Velikost</b>
---------------------------------	-----------------

<input type="radio"/>		Click Sleeve (neutěsněná nebo zavřená)
-----------------------	---	---

<input type="radio"/>		Click Dome™ jednoduchá (otevřená nebo zavřená)
-----------------------	---	---

<input type="radio"/>		Click Dome polootevřené
-----------------------	---	-------------------------

<input type="radio"/>		Click Dome dvojitě
-----------------------	---	--------------------

Standardní ušní koncovky můžete snadno vyměnit. Více se můžete dočíst v kapitole: „Údržba a péče“.

<b>Ušní koncovky vyrobené na míru uživateli</b>
---

<input type="radio"/>		Uživatelská tvarovka
-----------------------	---	----------------------

<input type="radio"/>		Click Mold™
-----------------------	---	-------------



## Ovládací prvky

Pomocí kolébkového přepínače můžete například nastavovat hlasitost nebo přepínat naslouchací programy. Požadované funkce pro kolébkový přepínač naprogramoval Váš foniatr.



<b>Funkce kolébkového přepínače</b>	<b>L</b>	<b>R</b>
<b>Krátké stisknutí:</b>		
Následující/předcházející program	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení/snížení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení/snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Streaming TV zap./vyp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Stiskněte po dobu asi 2 sekundy:</b>		
Následující/předcházející program	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení/snížení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení/snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Streaming TV zap./vyp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Stiskněte tlačítko na déle než 3 sekundy:</b>		
Pohotovost/zapnuto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktivování/deaktivování režimu „v letadle“	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = levá strana, R = pravá strana



Jestliže si přejete přepnout naslouchací program a nastavovat hlasitost sluchadel, můžete použít také dálkové ovládání. Pomocí své aplikace pro chytré telefony máte k dispozici ještě další možnosti nastavení parametrů.

## Naslouchací programy

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Více se můžete dočíst v kapitole:  
„Změna naslouchacího programu“.

## Vlastnosti

- Zpoždění při zapínání** vám umožňuje si nasazovat sluchadla, aniž by pískala.

Více se můžete dočíst v kapitole:  
„Zapínání a vypínání“.

- Terapeutická funkce Tinnitus** (potlačení hučení) generuje zvuk, abyste byli odvedeni od vašich hučivých zvuků.

- Funkce **telecoil** je integrována do oddělení pro baterii, což sluchadlu umožňuje připojovat se do indukčních smyček pro přenos audiosignálu.

Další informace si přečtete v kapitole „Indukční smyčky pro přenos audiosignálu“.

# Baterie

Když je baterie vybitá, zvuk zeslábně a uslyšíte signál, jímž budete na tuto situaci upozorněni. Typ baterie bude rozhodovat o tom, v jakých intervalech budete muset baterii vyměňovat.

## Velikost baterie a rady týkající se zacházení

Pokud budete potřebovat doporučené baterie, obraťte se na svého foniatra.

---

Velikost baterie:	312
-------------------	-----

---

- Pro svá sluchadla vždy používejte baterie správné velikosti.
- Pokud máte v úmyslu po několik dní svá sluchadla nepoužívat, vyjměte baterie.
- Vždy mějte s sebou náhradní baterie.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte a při jejich likvidaci dodržujte lokální pravidla pro recyklaci.


## Výměna baterií

Vyjmutí baterie:

- ▶ Otevřete oddělení pro baterii.



- ▶ Abyste baterii vytáhli, použijte magnetickou tyčinku. Magnetická tyčinka je k dispozici jako příslušenství.

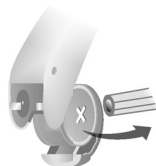

Založení baterie:

- ▶ Pokud má baterie ochrannou vrstvu, odstraňujte ji jedině tehdy, když jste připraveni baterii použít.
- ▶ Baterii zasuňte tak, aby byl symbol „+“ obrácen směrem nahoru (viz obrázek).



- ▶ Oddělení pro baterii opatrně uzavřete. Pokud cítíte odpor, baterie nebyla založena správně.

Nepokoušejte se zavřít oddělení pro baterii silou.  
Mohlo by se poškodit.

# Každodenní použití

## Zapínání a vypínání

Máte následující možnosti, jak můžete sluchadla zapnout nebo vypnout.

Prostřednictvím přihrádky pro baterii:

- ▶ Zapínání: Přihrádku pro baterii uzavřete.  
Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.
- ▶ Vypínání: Přihrádku baterie otevřete až k první zarážce.

Prostřednictvím kolébkového přepínače:

- ▶ Zapnutí nebo vypnutí: Kolébkový přepínač stiskněte a podržte jej stisknutý po několik sekund. Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete popis nastavení kolébkového přepínače.

Po zapnutí se nastaví **posledně** používaná hlasitost a nastavený naslouchací program.

Když používáte sluchadla, můžete být pomocí nastavitelného výstražného tónu upozorňováni, když je sluchadlo zapnuto nebo vypnuto.

Když je aktivována funkce **zpoždění při zapínání**, sluchadlo se zapne až poté, co uplyne prodleva v délce několika sekund. Během této doby si můžete sluchadla vložit do uší, aniž byste slyšeli nepříjemné pískání způsobené zpětnou vazbou.

Funkci „zpoždění při zapínání“ Vám může aktivovat Váš foniatr.

## Vkládání a vyjímání sluchadel

Vaše sluchadla jsou jemně vyladěna pro vaše pravé a levé ucho. Strana je rozlišována barevnými značkami:


- červená značka = pravé ucho
- modrá značka = levé ucho




Vkládání sluchadla:

- ▶ V případě sluchadel Click Sleeves dávejte pozor, aby se ohyb Click Sleeve shodoval s ohybem kabelu receiveru.

Správně:

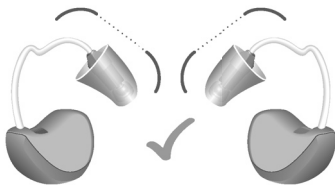


Špatně:

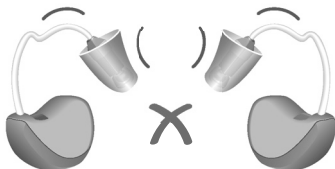

- ▶ Podržte kabel receiveru za jeho ohnutou část v blízkosti ušní koncovky.
- ▶ Opatrně zasuňte ušní koncovku do ušního kanálu ①.
- ▶ Mírně je pootočte, aby bylo dobře usazeno.

Otevřete a zavřete svá ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu.

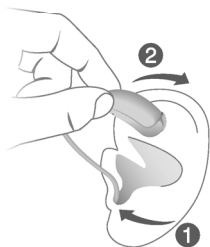

- ▶ Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ②.



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!

- ▶ Koncovku vkládejte do ucha opatrně a ne příliš hluboko.



- Může být pohodlné vkládat **pravé** sluchadlo do ucha **pravou** rukou a **levé** sluchadlo **levou** rukou.
- Pokud máte při zasouvání ušní koncovky problémy, pomocí druhé ruky jemně stáhněte ušní boltec směrem dolů. Tím se ušní kanál otevře a zasunutí ušní koncovky bude snazší.




Volitelný upevňovací prvek pomáhá bezpečně udržet ušní koncovku v uchu. Pokud chcete vložit upevňovací prvek na příslušné místo, postupujte následujícím způsobem:

- ▶ Ohněte upevňovací prvek a umístěte jej opatrně do spodní části svého ucha (viz obrázek).



Vyjímání sluchadla:

- ▶ Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ①.
- ▶ Pokud je Vaše sluchadlo vybaveno uživatelskou tvarovkou nebo pouzdem Click Mold, vyjměte je zatažením za malou vytahovací šňůrku směrem k zadní části hlavy.
- ▶ V případě jiných ušních koncovek: Dvěma prsty uchopte přijímač v ušním kanálu a opatrně jej vytáhněte ②.

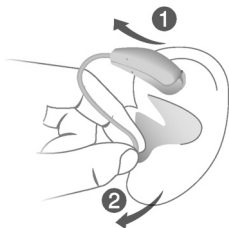

Netahejte za kabel přijímače.



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!

- ▶ Ve velmi vzácných případech by Vám mohla při snímání sluchadla koncovka zůstat v uchu. Jestliže se to stane, nechejte si koncovku vyjmout lékařem.

Po použití sluchadla vyčistěte a vysušte. Více se můžete dočíst v kapitole: „Údržba a péče“.

## Nastavení hlasitosti

Vaše sluchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu.

- ▶ Jestliže dáváte přednost manuálnímu nastavování hlasitosti, stiskněte kolébkový přepínač.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete popis nastavení kolébkového přepínače.

Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni tónovým signálem (volitelné). Jakmile je dosaženo maximální nebo minimální hlasitosti, je možné, že uslyšíte tónový signál (volitelné).

## Změna naslouchacího programu

V závislosti na akustické situaci sluchadla automaticky nastavují svůj výstup.

Vaše sluchadla mohou mít také několik naslouchacích programů, které vám umožňují podle potřeby změnit parametry zvuku. Na změnu programu můžete být upozorněni tónovým signálem (volitelné).

- ▶ Pokud si přejete změnit naslouchací program, stiskněte kolébkový přepínač.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete popis nastavení kolébkového přepínače. Nahlédněte do kapitoly „Naslouchací programy“, kde naleznete seznam svých naslouchacích programů.

Je použito předdefinované nastavení hlasitosti.

## **Další nastavení (volitelné)**

Prvky, kterými se ovládají sluchadla, můžete použít rovněž pro změny nastavení jiných parametrů, například úroveň terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus).

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků.

# Speciální poslechové situace

## Telefonování

Pokud telefonujete, držte telefonní přijímač mírně nad svým uchem. Sluchadlo a telefonní přijímač musí být proti sobě. Přijímač mírně pootočte, aby ucho nebylo zcela zakryto.



## Program pro telefonování

Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování.

- Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování.

Pokud je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, je to uvedeno v kapitole „Naslouchací programy“.

## Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu

Vaše sluchadla jsou **Made for iPhone**. To znamená, že do svých sluchadel můžete přímo z iPhoneu přenášet jak telefonní hovory, tak i třeba hudbu.

Pokud budete potřebovat další informace o kompatibilních přístrojích iOS a o ostatních užitečných funkcích, obraťte se na svého foniatra.

### Režim „v letadle“

V oblastech, kde je použití technologie Bluetooth zakázáno (např. v některých letadlech) můžete aktivovat režim „v letadle“. Tím se modul Bluetooth ve vašich sluchadlech dočasně vypne. Sluchadla i nadále fungují bez modulu Bluetooth, avšak přímý streaming audiosignálu nebude možný a ani ostatní funkce nebudou k dispozici.

- ▶ Pokud si přejete režim „v letadle“ aktivovat nebo deaktivovat, použijte ovládací prvky vašich sluchadel.

Pokud budete potřebovat další informace, viz kapitola „Ovládací prvky“.

Když je režim „v letadle“ aktivován nebo deaktivován, ozve se výstražný akustický signál.

## **Indukční smyčky pro přenos audiosignálu (volitelný doplněk)**

Některé telefony a veřejná místa, jako jsou divadla, nabízí možnost přenosu audiosignálu (hudba a mluvené slovo) pomocí indukční smyčky. Prostřednictvím tohoto systému mohou vaše sluchadla přímo přijímat požadovaný signál - bez rušivého hluku v prostředí.

Systémy s indukční smyčkou pro přenos audiosignálu můžete obvykle poznat pomocí určitých značek.



Pokud si přejete použít tento systém, je zapotřebí speciální přihrádka pro baterii. Je k dispozici jako příslušenství pouze pro určité typy sluchadel. Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na svého foniatra.

Kdykoli se nacházíte na místě, kde je indukční smyčka pro audiosignál:

- ▶ Přepněte na program Telecoil.

Pokud je program Telecoil nastaven v konfiguraci vašich sluchadel, je to uvedeno v kapitole „Naslouchací programy“.

## Program Telecoil a dálkové ovládání



### **POZNÁMKA**

Pro přístroje s možností bezdrátového připojení platí:

Jestliže je aktivní program telecoil, může dálkové ovládání způsobovat nepříjemný pulzující zvuk.

- ▶ Dálkové ovládání používejte ve větší vzdálenosti než 10 cm (4 palce).



# Údržba a péče

Aby se zabránilo poškození, je důležité o sluchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, která se brzy stanou běžnými činnostmi, které provádíte každý den.

## Naslouchací přístroje

### Sušení a skladování

- ▶ Přes noc svá sluchadla vysušte.
- ▶ V případě déletrvajících období, kdy se sluchadla nepoužívají, je skladujte s otevřenou přihrádkou pro baterii a s vyjmutými bateriemi v suchém prostředí.
- ▶ Pokud budete potřebovat další informace, zeptejte se svého foniatra.

### Čištění

Vaše sluchadla mají ochranný povlak. Pokud však nejsou sluchadla pravidelně čištěna, mohou se poškodit nebo způsobit poškození zdraví uživatele.

- ▶ Každý den sluchadla očistěte měkkým suchým hadříkem.
- ▶ Nikdy nepoužívejte tekoucí vodu a nikdy sluchadla neponořujte do vody.
- ▶ Při čištění sluchadla nevystavujte tlaku.



- Požádejte svého foniatra o doporučené čisticí prostředky, speciální soupravu pro ošetřování nebo o další informace o tom, jak udržet svá sluchadla v dobrém stavu.

## Ušní koncovky


### Čištění

Cerumen (ušní maz) se může akumulovat na ušních koncovkách. To může mít nepříznivý vliv na kvalitu zvuku. Každý den ušní koncovky vyčistěte.

Pro všechny typy ušních koncovek:

- Bezprostředně po vyjmutí očistěte ušní koncovku měkkou a suchou utěrkou.

Tím zabráníte zaschnutí a ztvrdnutí ušního mazu.

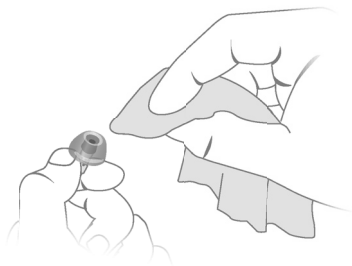

Pro Click Domes nebo Click Sleeves:

- Zmáčkněte špičku ušní koncovky.




## Výměna

Standardní ušní koncovky vyměňujte přibližně jednou za tři měsíce. Pokud zpozorujete praskliny nebo jiné změny, vyměňte je dříve. Postup při výměně standardní ušní koncovky závisí na jejím typu. V kapitole „Součásti a názvy“ váš foniatr typ ušní koncovky vyznačil.


### Výměna vložky Click Domes

- ▶ Jestliže chcete odpojit starou vložku Click Dome, použijte nástroj pro odpojení nebo postupujte podle pokynů na obalu vložky Click Domes: Dávejte pozor, abyste netahali za kabel receiveru.

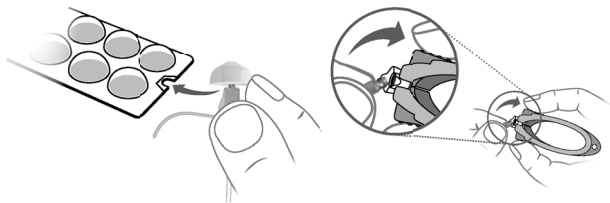


Nástroj pro odpojení je k dispozici jako příslušenství.

- ▶ Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby nová ušní vložka Click Dome se zřetelným cvaknutím zapadla na své místo.
- ▶ Zkontrolujte, zda je nová ušní vložka Click Dome dobře upevněna.

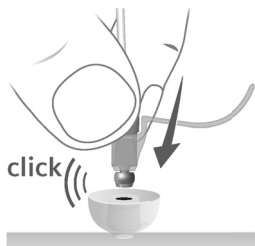

## Výměna vložky Click Sleeves

- ▶ Vložku Click Sleeve obraťte naruby.
- ▶ Svými prsty uchopte vložku Click Sleeve a receiver (nikoli za kabel receiveru) a vložku Click Sleeve stáhněte.
- ▶ Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby nová ušní vložka Click Sleeve se zřetelným cvaknutím zapadla na své místo.

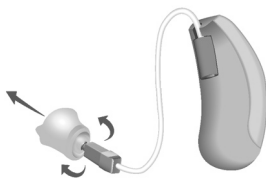

## Profesionální údržba

Důkladné profesionální čištění a údržbu může uskutečnit váš foniatr.

Výměnu ušních koncovek vyrobených na míru uživateli a filtrů proti ušnímu mazu by měl podle potřeby provádět váš foniatr.

Požádejte svého foniatra, aby vám poskytl individuální doporučení týkající se intervalů údržby a podpory.

# Další informace

## Bezpečnostní informace

Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace, nahlédněte do příručky věnované bezpečnosti, která je dodávána spolu s vašimi sluchadly.

## Příslušenství

Pro pohodlné dálkové ovládání vašich sluchadel můžete používat aplikaci Smartphone App. Tato aplikace vám umožňuje také deaktivovat tónové signály, vytvářet individuální akustické profily a ovládat mnoho dalších funkcí.

Můžete použít také dálkové ovládání.

Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na svého foniatra.

## Symbyoly použité v tomto dokumentu

---



Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví.

---



Upozorňuje na hrozící hmotné škody.

---



Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe.

---



Označení „Made for iPhone“, „Made for iPad“ a „Made for iPod“ znamenají, že toto elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPhone, iPadu, nebo iPodu a že firma, která je vyvinula, prohlašuje, že splňuje výkonové normy firmy Apple. Firma Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení a ani za to, že splňuje bezpečnostní normy a úřední nařízení. Mějte prosím na paměti, že použití tohoto příslušenství s jednotkami iPhone, iPad nebo iPod může mít nepříznivý vliv na výkon bezdrátové komunikace.

## Odstraňování potíží

### Problém a možná řešení

---

Zvuk je slabý.

---

- Zvyšte hlasitost.
  - Vyměňte vybitou baterii.
  - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
- 

Sluchadlo vydává pískavé zvuky.

---

- Znovu zasuňte ušní koncovku, aby bezpečně zapadla na své místo.
  - Snižte hlasitost.
  - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
- 

Zvuk je zkreslený.

---

- Snižte hlasitost.
  - Vyměňte vybitou baterii.
  - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

## **Problém a možná řešení**

---

Sluchadlo vydává tónový signál.

---

- Vyměňte vybitou baterii.
- 

Sluchadlo nefunguje.

---

- Sluchadlo zapněte.
  - Oddělení pro baterii pečlivě a důkladně uzavřete.
  - Vyměňte vybitou baterii.
  - Ujistěte se, že baterie je instalována správně.
  - Je aktivní zpožděné zapínání. Počkejte několik sekund a zkontrolujte to znovu.
- 

Pokud se budete potýkat s jakýmkoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra.

## **Specifické informace pro danou zemi**

### **USA a Kanada**

Informace o certifikaci pro sluchadla s funkcí pro bezdrátovou komunikaci:

Pure 312 X

- HVIN: RFM002
- Obsahuje FCC ID: SGI-RFM002
- Obsahuje IC: 267AB-RFM002



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Servis a záruka

Výrobní čísla	Přístroj	Jednotka receiveru
---------------	----------	--------------------

Vlevo:

Vpravo:

### Data servisních úkonů

1:	4:
----	----

2:	5:
----	----

3:	6:
----	----

### Záruka

Datum zakoupení:

Záruční doba v měsících:

### Váš foniatr



**Výrobce z hlediska právních norem**

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Německo

Tel.: +49 9131 308 0

**Distributor**

Sivantos s.r.o.

Molákova 576/11

186 00 Praha 8 - Karlín

Tel.: +420 257 328 161

Dokument č. 03949-99T02-2D00 CS

Poslední revize 07/2019

