

Manuál k

Párování Pure Charge&Go BCT IX se zařízením Android



Sluchadla mají dvojí způsob připojení Bluetooth®.

- Bluetooth® LE se používá k individuálnímu propojení každého sluchadla Signia app for pro dálkové ovládání. Spárování tohoto připojení se provádí přímo v aplikaci.
- Bluetooth® Classic se používá k propojení sluchadel jako páru pro streamování audia a telefonních hovorů. Párování tohoto připojení se provádí v nabídce Bluetooth vašeho telefonu.

Pro oba způsoby párování sluchadel postupujte podle následujících kroků. Tyto pokyny slouží jako obecný návod, jelikož podrobnosti v menu se mohou u různých telefonů se systémem Android lišit.

Krok 1

Stáhněte si aplikaci Signia app (verzi 2.7.0 a novější).


Krok 2

Zapněte na svém telefonu Bluetooth.

Pokud jsou vaše sluchadla již spárována s jiným zařízením v blízkosti, během procesu párování vypněte na tomto zařízení Bluetooth.


Krok 3

Otevřete aplikaci Signia app.

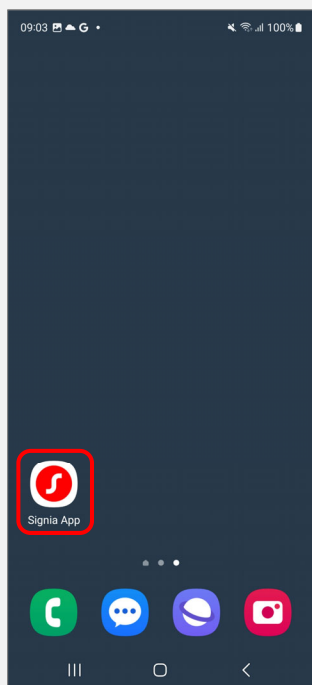


Krok 4

Klikněte na párování Bluetooth.

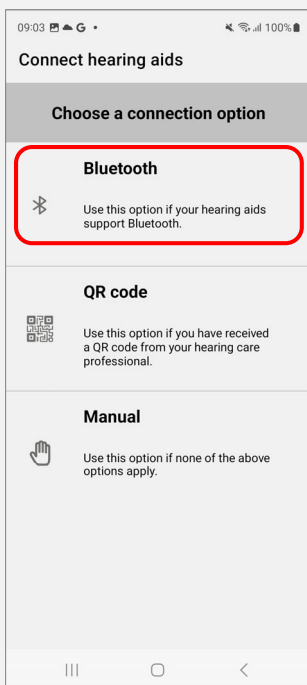


Krok 5

Vypněte a zapněte sluchadla. Tak aktivujete mód párování na cca 3 minuty. **Klikněte na OK.**

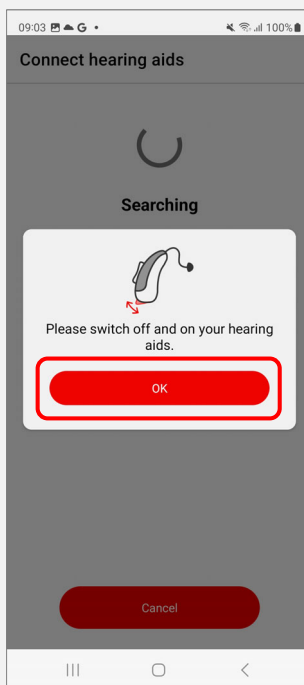



Krok 6

Klikněte na svá sluchadla, jakmile se objeví.

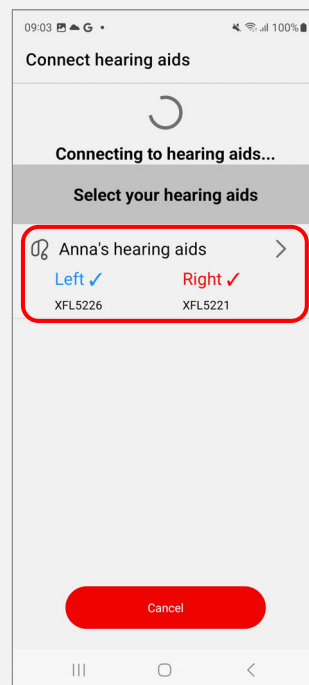


Krok 7

Zobrazí se žádost o spárování Bluetooth – **klikněte na Párovat**. Pokud párujete dvě sluchadla, po chvíli se žádost objeví znovu. Proces zopakujte.

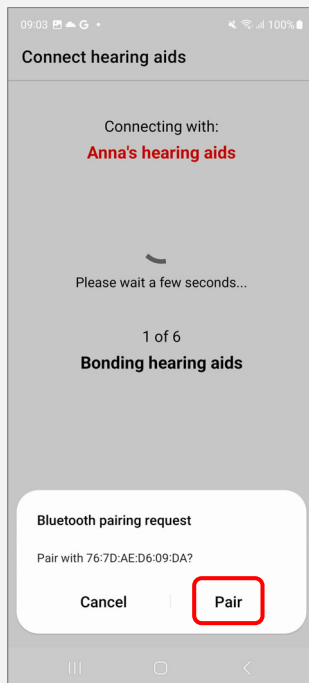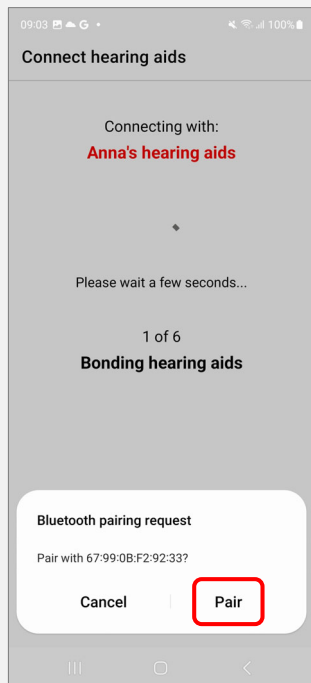


Krok 8

Sluchadla jsou nyní spárována s aplikací Signia app. **Klikněte na šipku vedle Spustit streamování**, čímž spárujete sluchadla pro streamování audia.

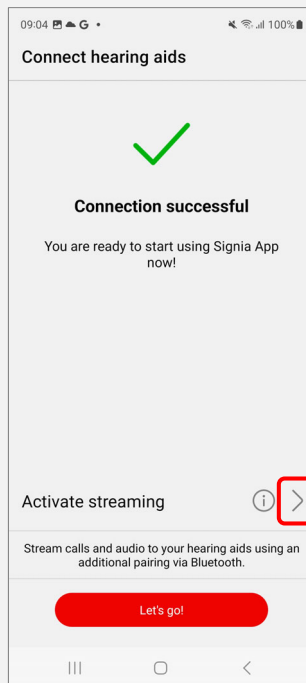


Krok 9

Klikněte na Otevřít nastavení telefonu.

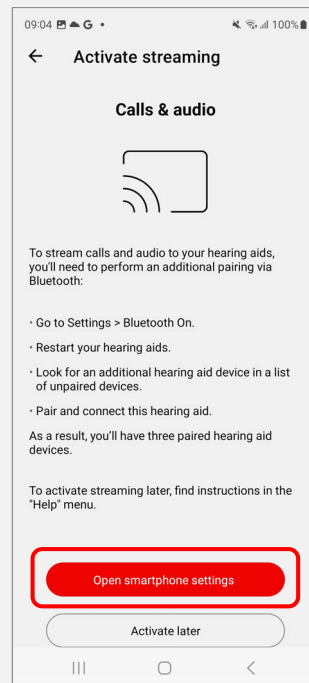



Krok 10

Klikněte na Bluetooth, čímž otevřete Bluetooth menu.

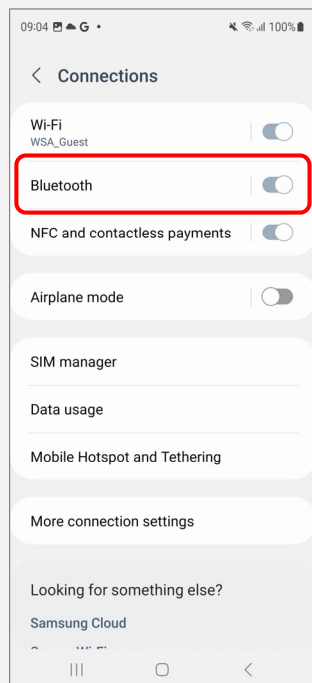

Krok 11

Svá sluchadla uvidíte v seznamu Spárovaná zařízení (jedná se o spárování s aplikací Signia app, v závislosti na telefonu se může zobrazit jeden nebo dva seznamy). Sluchadla se také zobrazí v sekci Dostupná zařízení. **Klikněte na sluchadlo**, poté **klikněte na Párovat** – tím se sluchadla spárují mezi sebou pro streamování audia.

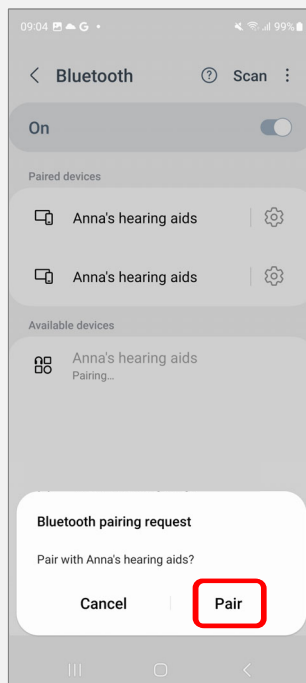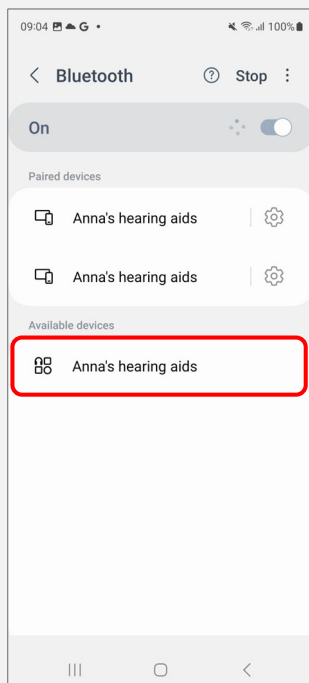

Krok 12

Nyní můžete streamovat audio přímo do sluchadel.

