

Manuál

Párování Pure Charge&Go BCT IX se zařízením iPhone



Sluchadla mají dvojí způsob připojení Bluetooth®.

- Bluetooth® LE se používá k individuálnímu propojení každého sluchadla s aplikací Signia app pro dálkové ovládání. Spárování tohoto připojení se provádí přímo v aplikaci.
- Bluetooth® Classic se používá k propojení sluchadel jako páru pro streamování audia a telefonních hovorů. Párování tohoto připojení se provádí v nabídce Bluetooth® vašeho telefonu.

Pro oba způsoby párování sluchadel postupujte podle následujících kroků:

Krok 1

Stáhněte si aplikaci Signia app (verzi 2.7.0 a novější).



Krok 2


Zapněte na svém telefonu Bluetooth®.



Pokud jsou vaše sluchadla již spárována s jiným zařízením v blízkosti, během procesu párování vypněte na tomto zařízení Bluetooth.


Krok 3

Otevřete aplikaci **Signia app**.

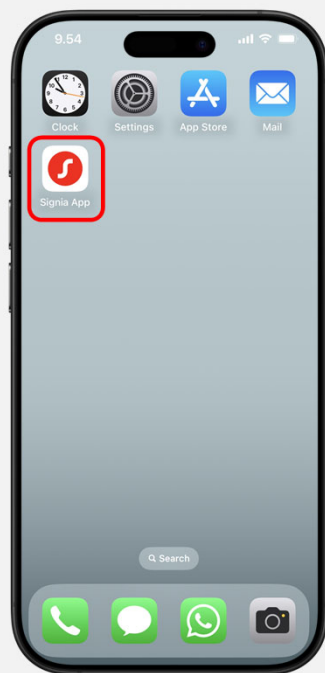


Krok 4

Klikněte na párování **Bluetooth**.

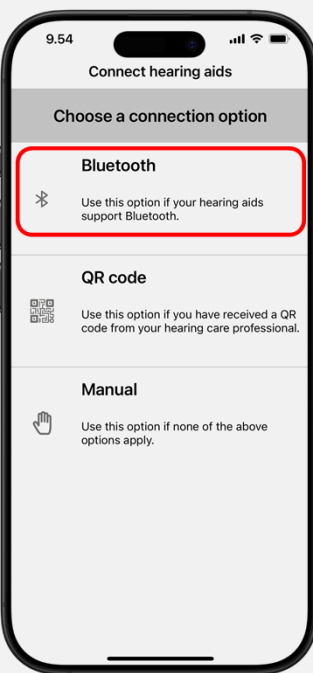


Krok 5

Vypněte a zapněte sluchadla. Tak aktivujete mód párování na cca 3 minuty. **Klikněte na OK.**

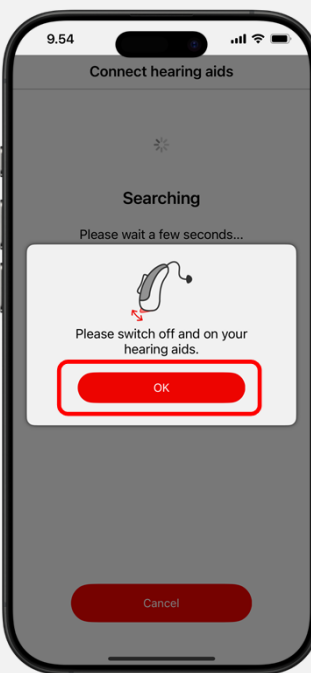


Krok 6

Klikněte na svá sluchadla, jakmile se objeví.

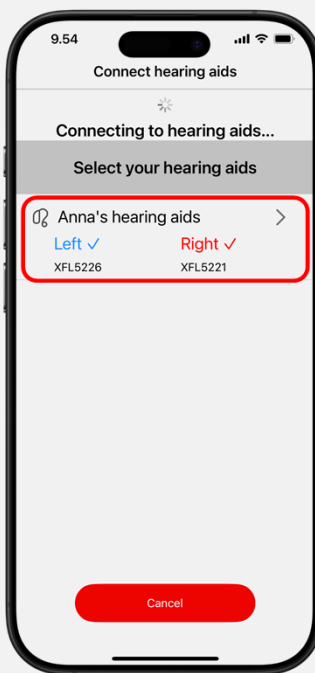

Krok 7

Zobrazí se žádost o spárování Bluetooth® – **klikněte na Párovat**. Pokud párujete dvě sluchadla, po chvíli se žádost objeví znovu. Proces zopakujte.

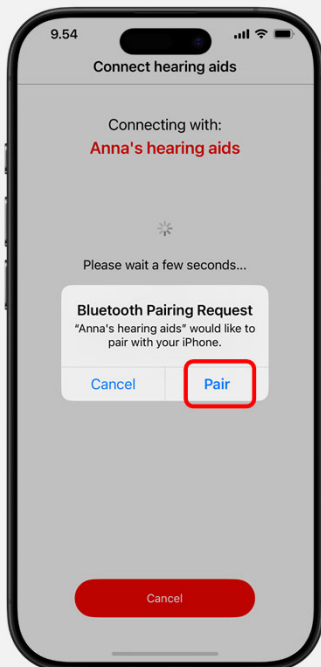


Krok 8

Sluchadla jsou nyní spárována s aplikací Signia app. Pro streamování audio postupujte podle následujících kroků.



Krok 9

Otevřete v telefonu **Nastavení**, poté klikněte na **Bluetooth®** a otevřete Bluetooth® menu. **Vypněte a zapněte svá sluchadla**.

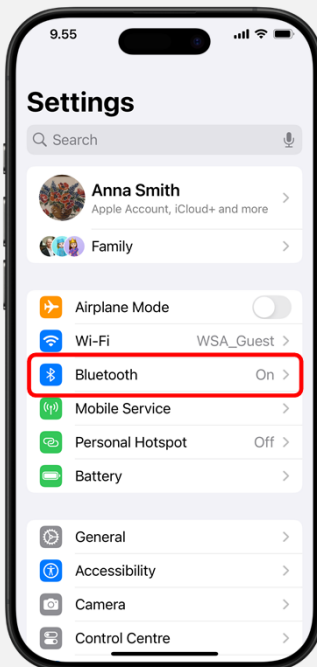


Krok 10

V sekci **Moje zařízení** uvidíte dvě připojená sluchadla (párování s aplikací Signia app). V sekci **Ostatní zařízení** se objeví třetí sluchadlo. **Kliknutím na sluchadlo jej spárujete**.




Krok 11

Klikněte na ikonu ⓘ nově spárovaného sluchadla. Následující možnosti se zobrazí pouze u sluchadla spárovaného pro streamování.

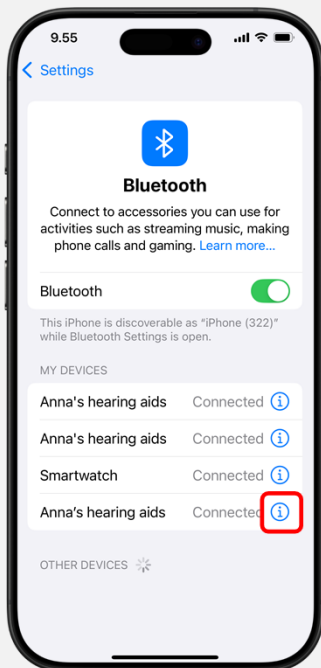


Krok 12

Klikněte na šipku vpravo u názvu sluchadel a zadejte nové jméno pro rozlišení od párování s aplikací Signia app.

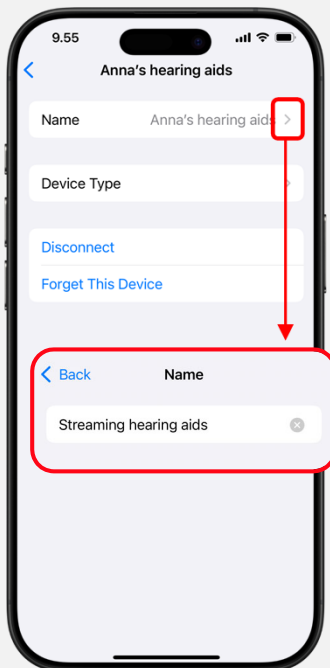

Krok 13

Klikněte na šipku vpravo od typu zařízení a vyberte Sluchadlo.

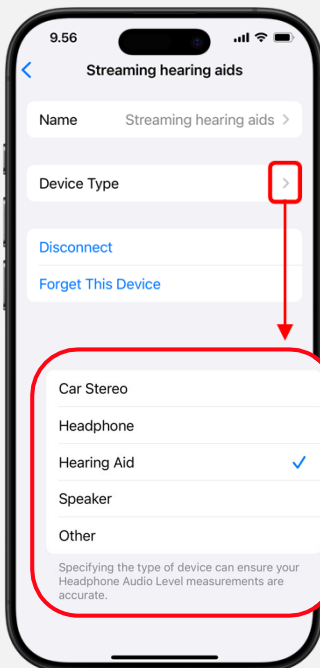

Krok 14

Nyní můžete streamovat audio přímo do sluchadel.

