



Wie bediene ich meine Hörgeräte? Ein Überblick – kurz und bündig.

Hörgeräte ein- und ausschalten

Durch langen Druck auf den Wipptaster unten können Sie Ihre Hörgeräte einschalten. Durch erneuten langen Druck werden die Hörgeräte ausgeschaltet.

Wird das Hörgerät mit Batterien betrieben, kann die Batterielade etwas geöffnet werden, um es auszuschalten.

Ein-/Ausschalten mit dem Ladegerät

Aufladbare Hörgeräte sind besonders einfach zu bedienen. Nach dem Einsetzen in das Ladegerät werden die Hörgeräte automatisch ausgeschaltet. Nach dem Entnehmen schalten sich die Hörgeräte automatisch ein.



Hörgeräte zur Ausprobe

Signia stellt Demo-Hörgeräte für die Ausprobe zur Verfügung. Entscheiden Sie sich für ein Hörgerätemodell, erhalten Sie neu verpackte Hörgeräte.

Ihr/e Hörakustiker/in legt die Testzeit fest. Ist die Testzeit abgelaufen, erinnert ein alle drei Minuten wiederkehrender Signaltone daran. Bitte vereinbaren Sie dann einen Termin im Fachgeschäft, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Signaltöne

Ihre Hörgeräte spielen eine Melodie ab, wenn sie ein- und ausgeschaltet werden.

Wenn die Batterie bzw. der Akku leer ist, erhalten Sie eine Warnung.

Es gibt noch mehr Möglichkeiten, mit Signaltönen etwas anzuzeigen, z.B. wenn bei Änderung der Lautstärke das Maximum erreicht wird. Die Signaltöne können Sie mit Ihrer/em Hörakustiker/in im Fachgeschäft festlegen.

Fernbedienen mit der Signia App

Besitzen Sie ein Smartphone? Dann können Sie Ihre Hörgeräte, mit und ohne Bluetooth, über die kostenlose Signia App fernbedienen. Auf unserer Homepage finden Sie nützliche Videos, auch zum Thema „Signia App auf dem Smartphone installieren“.



Installation auf dem Smartphone und Kopplung mit iOS



Streaming von Android-Geräten



Signia App - Funktionen im Überblick

Sie benötigen Hilfe?

Kontaktieren Sie bei Fragen und technischen Problemen zu Ihren Hörgeräten immer zuerst Ihre/n HörgeräteakustikerIn. Das Fachgeschäft ist Ihre direkte Anlaufstelle bei audiologischen/ technischen Fragen rund um Ihre Hörgeräte. Zudem finden Sie Tipps zur „Problembehandlung“ in der Bedienungsanleitung Ihrer Hörgeräte. Diese erhalten Sie im Fachgeschäft.

Hier finden Sie Erklärvideos zu verschiedenen Hörgeräten und Themen: signia.net → Service und Support → How-to-Videos
www.signia.net/de-de/support/how-to-videos