


- 1 Wählen Sie Ihre **Hörsysteme**: Einfach **antippen**
- 2 Danach **Koppeln**

Warten Sie auf „Verbindung erfolgreich“ auf dem Screen. Tippen Sie auf **Fortfahren**.



Datenschutz-Einstellungen

Akzeptieren Sie, indem Sie auf **Fortfahren** tippen.

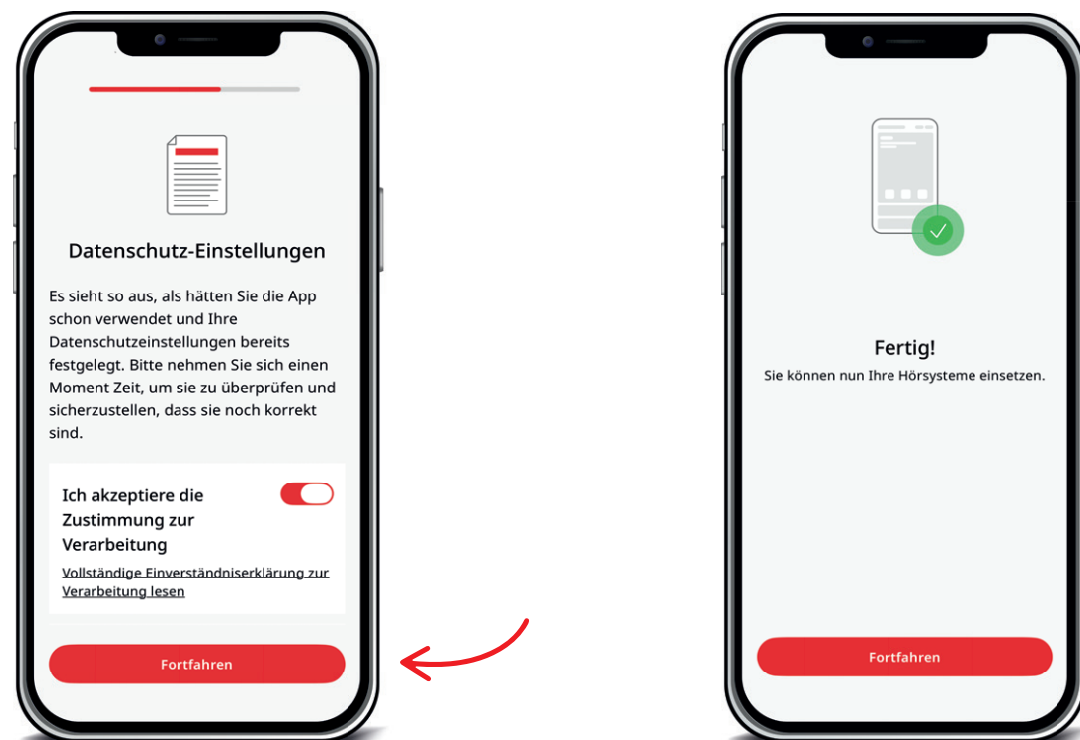

Fertig!

Tippen Sie auf **Fortfahren**.

Das war es schon! Sie können mit der Signia One App loslegen.

Be
Brilliant™




SIGNIA ONE APP

Installation & Koppeln




Signia One App für MaX Hörgeräte herunterladen

Laden Sie sich kostenlos die Signia One App aus dem **App Store (iOS)** bzw. dem **Google Play Store (Android)** herunter. Tippen Sie auf „**Installieren**“ bzw. „**Laden**“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

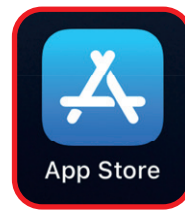

Bluetooth einschalten

Öffnen Sie „**Einstellungen**“ und aktivieren Sie Bluetooth.

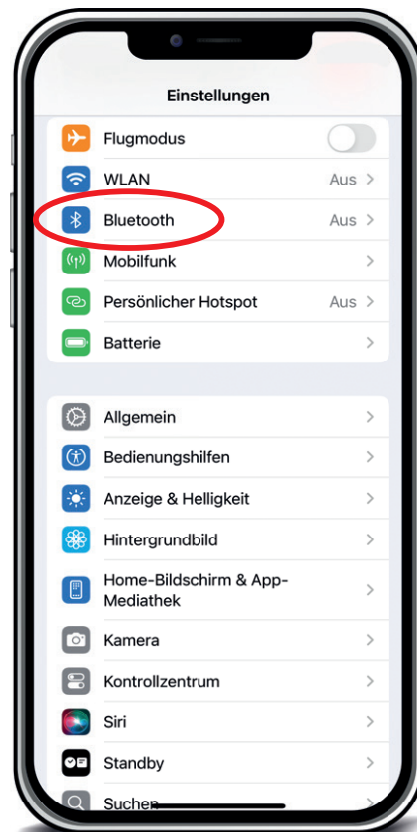

MaX Hörgeräte mit der App und dem Smartphone koppeln

Tippen Sie auf:
Einrichten der App.



Öffnen Sie die Signia One App:
Tippen Sie auf **Ich akzeptiere** (AGB und Datenschutzhinweis).



Bluetooth Berechtigungen zulassen:
Tippen Sie auf **Fortfahren**.



Kopplungsmodus aktivieren: Hörgeräte aus- und wieder einschalten. **Fortfahren**.



Tip

Ausschalten:
Hörgeräte in das Ladegerät einsetzen (LED blinkt rot).

Einschalten:
Hörgeräte wieder herausnehmen (LED leuchtet grün).

Oder ca. 3 s auf die unteren Tasten an den Hörgeräten drücken.