

Be
Brilliant™



Anleitung: So einfach koppeln Sie Pure Charge&Go BCT IX


In drei einfachen Schritten startklar für brillantes Hören und komfortables Streaming von Smartphone und Tablet.




signia

Schritt 1: Signia App herunterladen

1. Laden Sie sich kostenlos die Signia App aus dem **App Store (iOS)** bzw. dem **Google Play Store (Android)** herunter. Tippen Sie auf **„Installieren“** bzw. **„Laden“** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

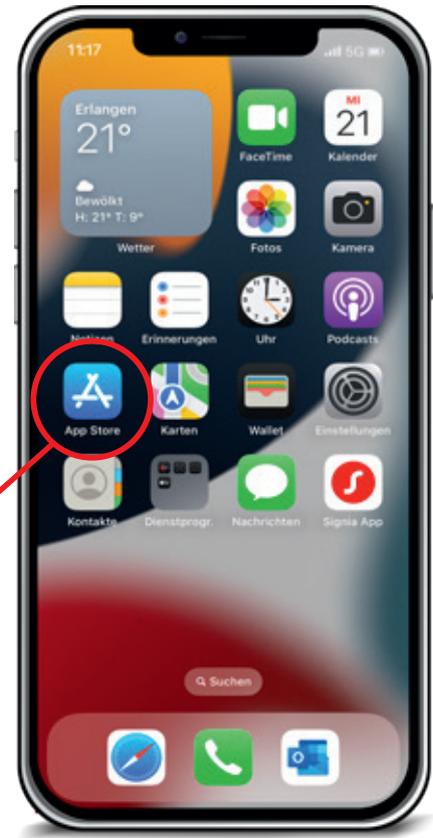

2. Ist Bluetooth eingeschaltet? Wenn nicht, öffnen Sie **„Einstellungen“** auf Ihrem Smartphone und aktivieren Sie Bluetooth.

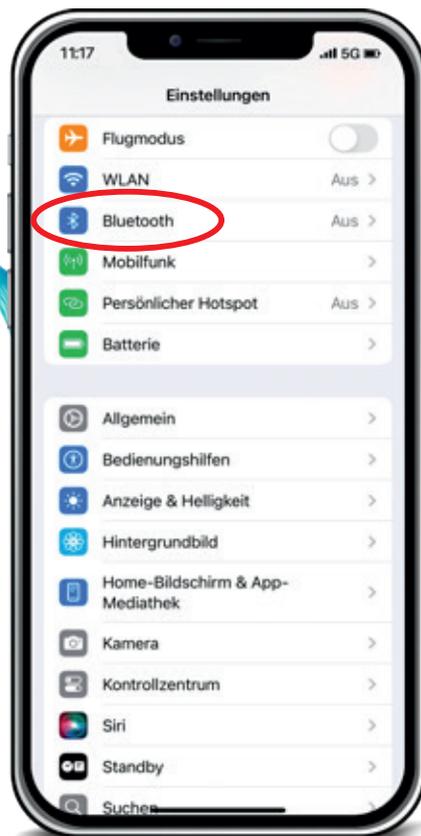


Schritt 2: Hörgeräte mit der App koppeln


1. Öffnen Sie die Signia App.



2. Wählen Sie „Bluetooth“ aus.

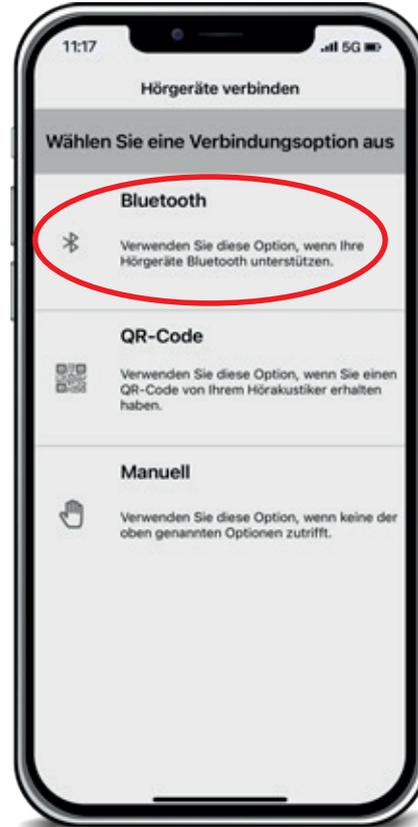

3. Schalten Sie Ihre Hörgeräte ein bzw. starten Sie Ihre Hörgeräte neu.

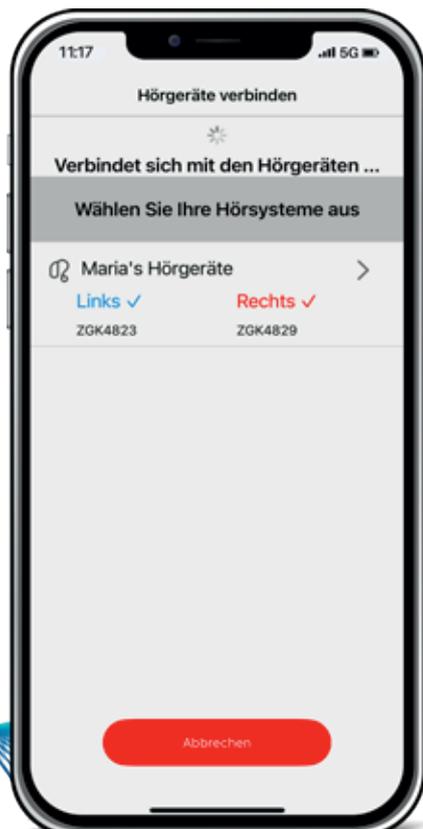

Tipp: Hörgeräte ins Ladegerät einsetzen und kurz darauf wieder entnehmen. So starten Sie sie am einfachsten neu.

Ihre Hörgeräte erscheinen nun beide mit ihren Seriennummern. Tippen Sie sie an.

4. Bestätigen Sie jeweils mit „Koppeln“ – wichtig: **beide Geräte** koppeln! „Verbindung erfolgreich“ wird angezeigt.




Schritt 3: Hörgeräte mit dem Smartphone koppeln

1. Gehen Sie jetzt in die „**Einstellungen**“ > „**Bluetooth**“ Ihres iPhones bzw. Android-Smartphones.



2. Sie sehen jetzt **zwei verbundene Geräte**.
3. Schalten Sie Ihre Hörgeräte **aus und wieder ein**.
4. Nun erscheint Ihr Hörgerät ein **drittes Mal** unter „**Andere Geräte**“ (iPhone) bzw. „**Verfügbare Geräte**“ (Android).

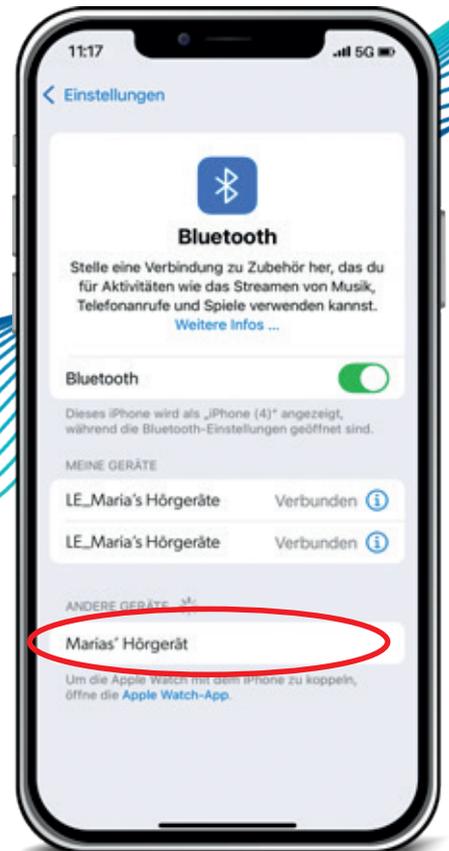

5. Tippen Sie auf den **dritten Eintrag**. Ihr Smartphone verbindet sich nun mit dem Hörgerät, das die Streamingverbindung aufbaut.

Info: Der Hörgerätetyp erscheint **einmal fürs Streaming** und **zweimal für die App**. LE vor dem Namen weist auf die App-Verbindung hin.

Fertig! Jetzt sind Sie bereit für Gespräche, Musik, Podcasts oder Telefonate – direkt in Ihren Hörgeräten.

iOS zeigt drei Hörgeräte als „Verbunden“ an. Android listet die drei Hörgeräte unter „Gepaarte Geräte“.

