



**Wie reinige ich die Ladekontakte?**



# Wie reinige ich die Ladekontakte?

Regelmäßiges Reinigen ist wichtig. Vor allem die Ladekontakte sollen staub- und fettfrei sein, damit Ihre Hörgeräte zuverlässig laden.

## Schritt 1

Reinigungstuch, Alkohol aus der Apotheke und Wattestäbchen bereitlegen.

## Schritt 2

Lade- und Hörgeräte mit dem trockenen Tuch abwischen.

## Schritt 3

Wattestäbchen mit Alkohol befeuchten und goldfarbene Ladekontakte reinigen.

**Fertig!**

Beispiel Silk und Ladegerät

