

## Guía rápida de inicio

# Emparejamiento de Pure Charge&Go BCT IX con Android



Tus audífonos utilizan dos tipos de conexiones Bluetooth®.

- Bluetooth® LE se utiliza para conectar cada audífono individualmente a la aplicación Signia para realizar ajustes de control remoto. **El emparejamiento de esta conexión se realiza a través de Signia App.**
- Bluetooth® Classic se utiliza para conectar sus audífonos conjuntamente para la transmisión de llamadas y audio. **El emparejamiento de esta conexión se realiza a través del menú Bluetooth de tu teléfono.**

Sigue los sencillos pasos que se indican a continuación para emparejar ambos tipos de conexiones Bluetooth. *Estas pretenden ser una guía general, ya que los detalles del menú pueden variar entre los diferentes teléfonos Android.*

### Paso 1

Descarga Signia App (versión 2.7.0 o posterior).



### Paso 2

Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado.



*Nota: Si tus audífonos ya están emparejados con otro dispositivo cercano, apaga el Bluetooth® de ese otro dispositivo durante el proceso de emparejamiento.*


### Paso 3

Abre Signia App.



### Paso 4

Elije la opción de emparejamiento de Bluetooth.

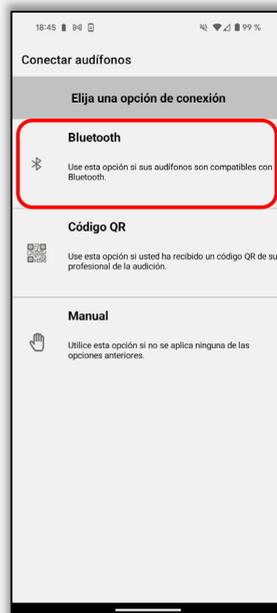


### Paso 5

Apaga y vuelve a encender tus audífonos. Colócalos en el cargador durante 5 segundos y luego retíralos. El LED verde se iluminará y el audífono estará listo para emparejarse. **Toca Aceptar.**





### Paso 6

Cuando aparezcan tus audífonos, **toca tu nombre para seleccionarlos.**

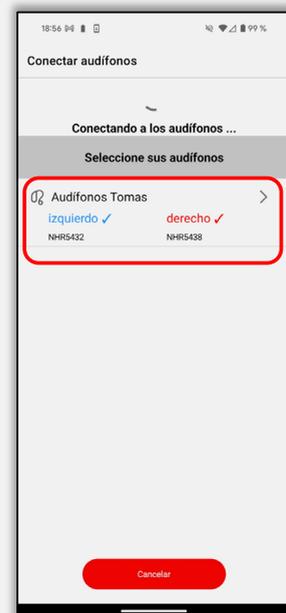

## Paso 7


Aparecerá una solicitud de emparejamiento de Bluetooth: **toca Emparejar**. Si estás emparejando dos audífonos, **esto sucederá dos veces**.

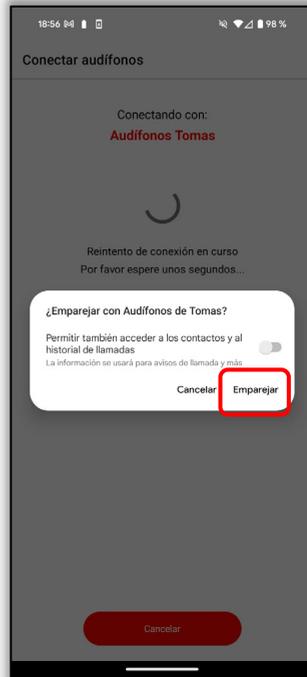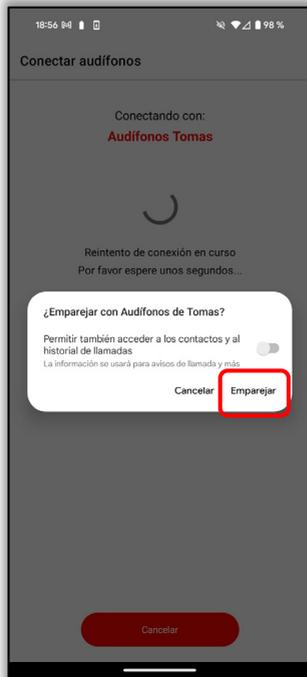

## Paso 8


Los audífonos ahora están emparejados con Signia App.

**Toca la flecha junto a Activar transmisión** para emparejarlos con la transmisión de audio.

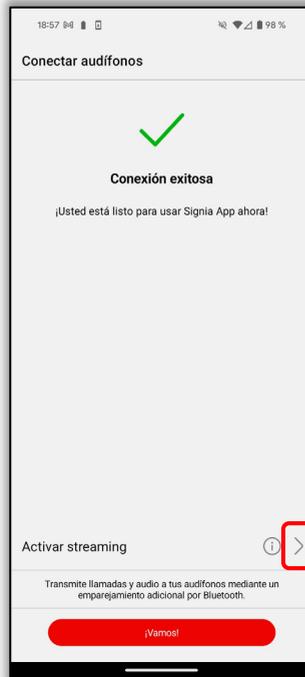

## Paso 9

**Pulsa Abrir configuración de smartphone** para abrir directamente el menú de Ajustes de tu teléfono.

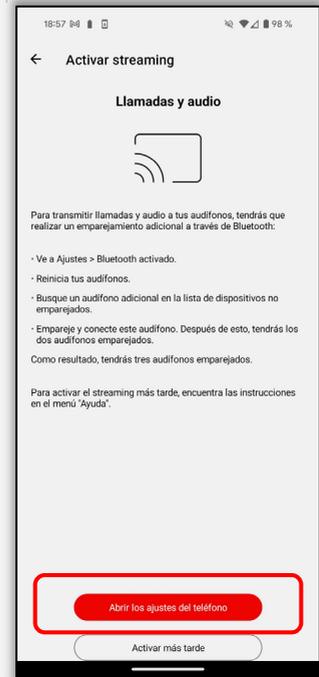



## Paso 10

**Toca Bluetooth** para abrir el menú Bluetooth. Apaga tus audífonos y vuelve a encenderlos para ponerlos en modo de emparejamiento.



## Paso 11

Tus audífonos aparecerán en la lista de Dispositivos emparejados (estos son los emparejamientos de Signia App, es posible que veas uno o dos listados según el teléfono). También aparecerán una vez en **Dispositivos disponibles**. Toca el audífono disponible, **luego toca Emparejar** cuando se te solicite: esto emparejará tus audífonos conjuntamente para la transmisión de audio.

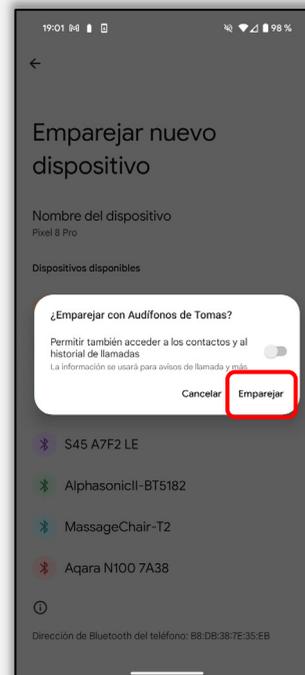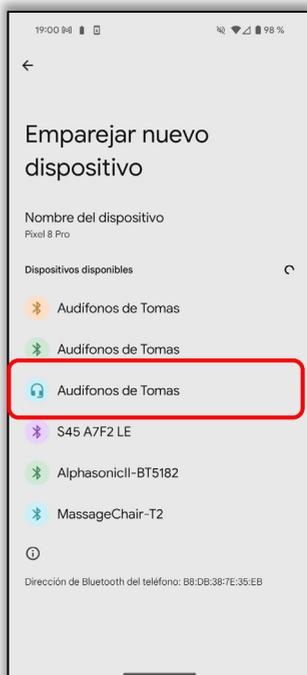

## Paso 12

Ahora estás listo para disfrutar de la transmisión de audio a tus audífonos.

