

Guía rápido de inicio

Emparejamiento de Pure Charge&Go BCT IX con un PC




Paso 1

Apaga y enciende tus audífonos colocándolos en el cargador durante 5 segundos y luego retíralos. El LED verde se iluminará durante 6 segundos; los audífonos estarán listos para emparejarse.

Nota: Si tus audífonos ya están emparejados con otro dispositivo cercano, apaga el Bluetooth® de ese otro dispositivo durante el proceso de emparejamiento.


Paso 2

Abre el menú **Configuración** haciendo clic en el icono de Windows de la barra de tareas situada en la parte inferior de la pantalla y escribiendo **Configuración**.

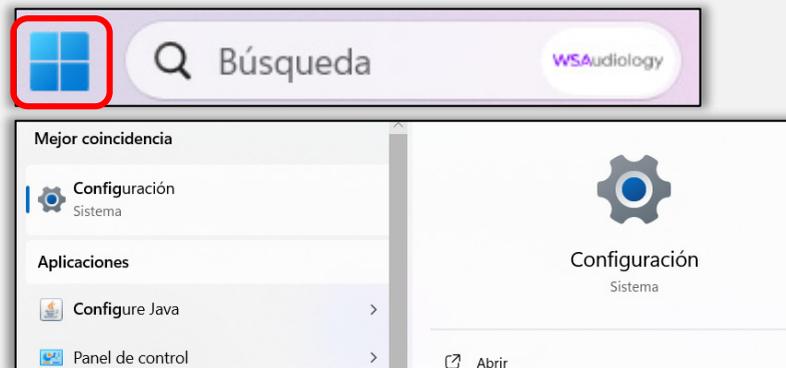


Paso 3

En la parte izquierda de la pantalla de Configuración, selecciona **Bluetooth y dispositivos**

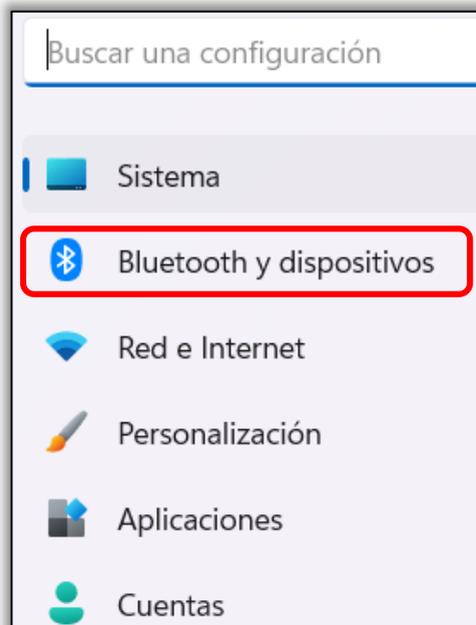


Paso 4

Asegúrate de que la opción Bluetooth está activada y haz clic en **Añadir dispositivo**.

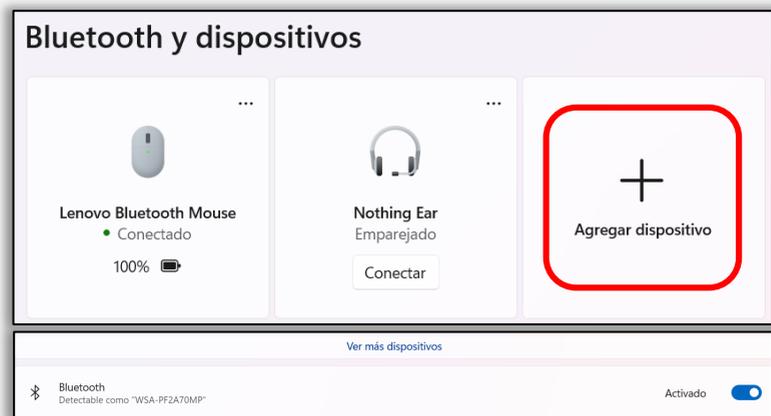

Paso 5


Haz clic en **Dispositivo Bluetooth**.

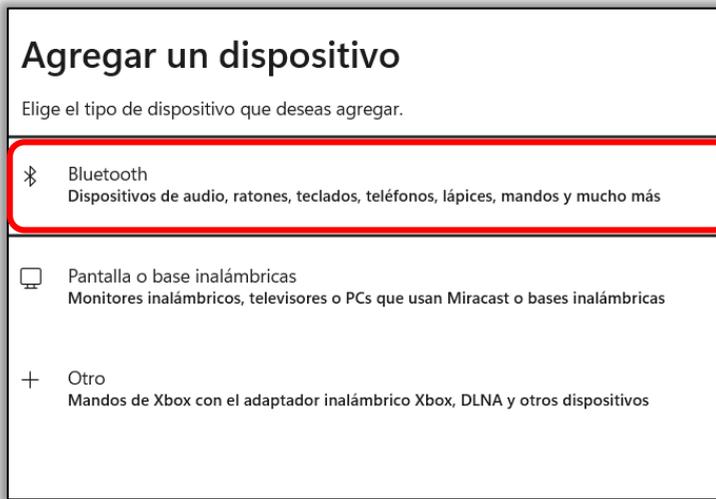

Paso 6


Los audífonos pueden tardar unos instantes en verse.

Haz clic en el **nombre del audífono** para completar el proceso de emparejamiento.

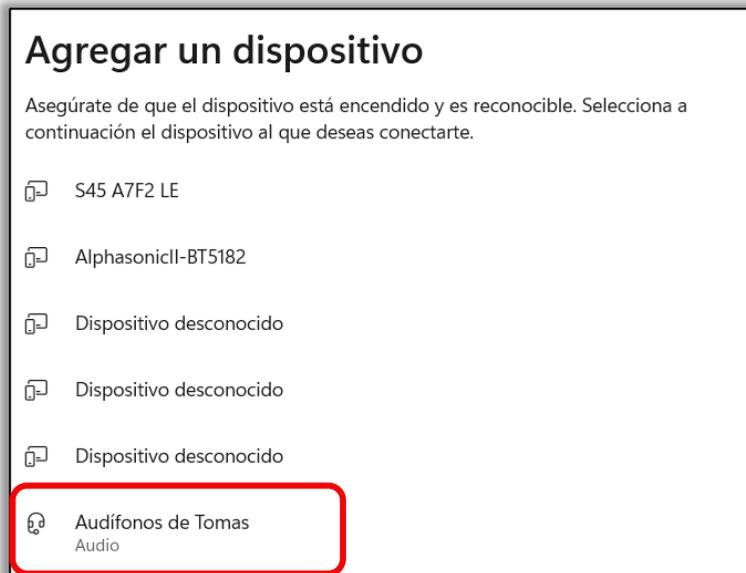

Paso 7

Disfruta de la transmisión desde tu ordenador a tus audífonos Pure Charge&GoBCT IX.

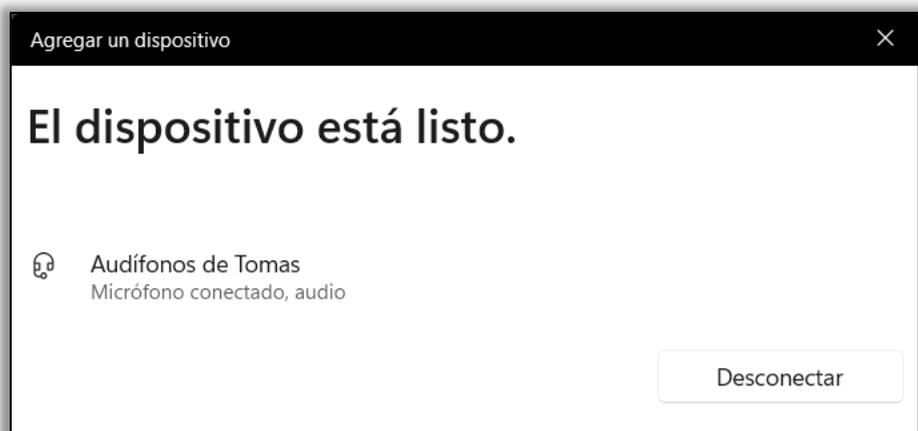

Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedades de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de WSAUD A/S se realiza bajo licencia.