

Guía de Inicio Rápido

Cómo emparejar Pure Charge&Go BCT IX a un Android



Bluetooth®
Connectivity
Transformed

Sus audífonos usan dos tipos de conexiones Bluetooth®.

- Bluetooth® LE se utiliza para conectar cada audífono individualmente a la app Signia y realizar ajustes de control remoto. El emparejamiento se realiza a través de la app Signia.
- Bluetooth® Classic permite conectar sus audífonos para transmitir llamadas y audio. El emparejamiento se realiza a través del menú Bluetooth de su teléfono.

Siga los sencillos pasos a continuación para emparejar ambos tipos de conexiones Bluetooth. *Estas instrucciones pretenden ser una guía general, ya que los detalles del menú pueden variar entre diferentes teléfonos Android.*

Paso 1

Descargar la Aplicación Signia (versión 2.7.0 o superior).


Paso 2

Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado.

Nota: Si sus audífonos ya están emparejados con otro dispositivo cercano, desactive el Bluetooth en ese otro dispositivo durante el proceso de emparejamiento.


Paso 3

Abrir la app Signia.

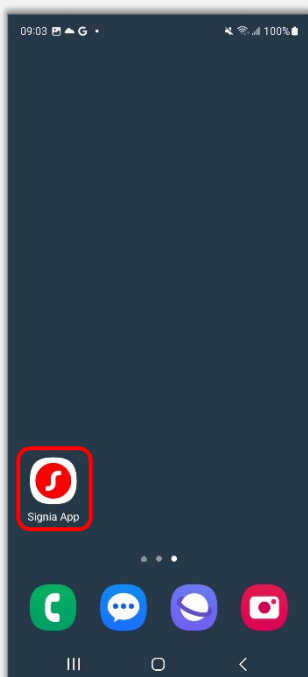


Paso 4

Toque la opción de emparejamiento Bluetooth.

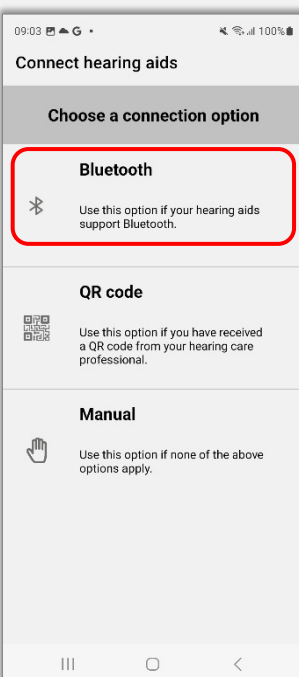


Paso 5

Apague y vuelva a encender sus audífonos para ponerlos en modo de emparejamiento durante aprox 3min. Toque OK.

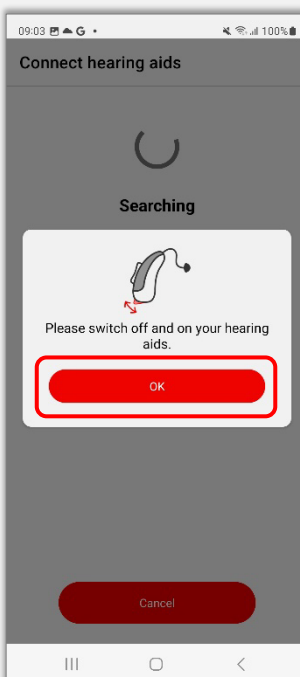



Paso 6

Cuando aparezcan sus audífonos, toque su nombre para seleccionarlo.

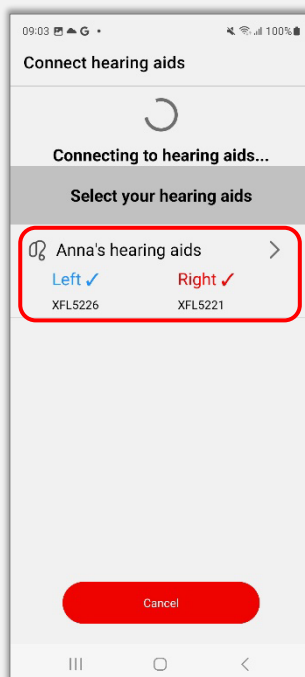

Paso 7


Aparecerá una solicitud de emparejamiento por Bluetooth: **pulsa "Emparejar"**. Si estás emparejando dos audífonos, aparecerá una segunda solicitud unos segundos después: **pulsa "Emparejar"** de nuevo.

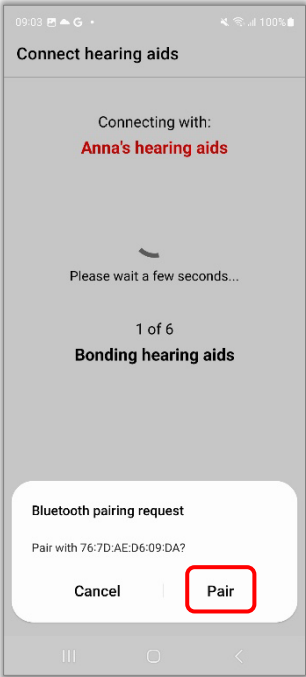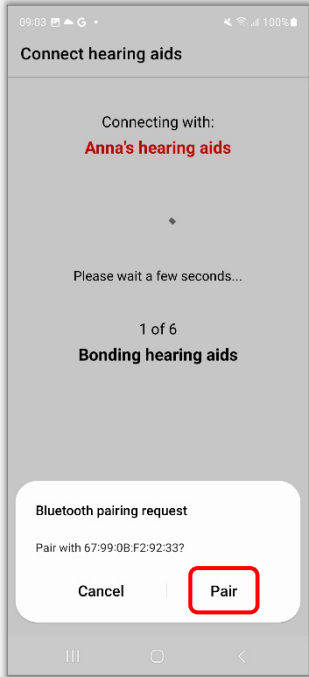

Paso 8


Los audífonos ya están emparejados con la app Signia.

Toque la flecha junto a Activar transmisión para emparejarlos para la transmisión de audio.

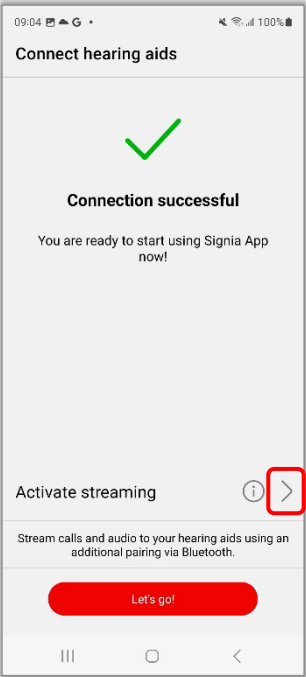


Paso 9

Toque Abrir configuración del teléfono inteligente para abrir directamente el menú de Configuración de su teléfono.

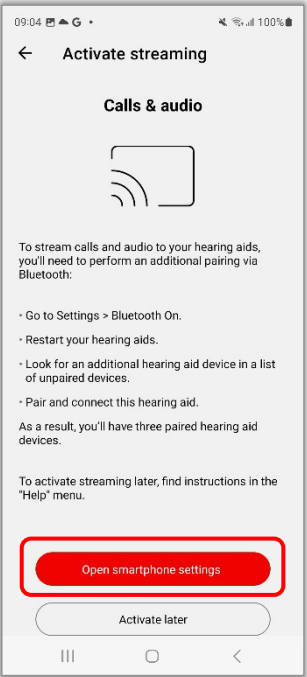

Paso 10



Toque Bluetooth para abrir el menú de Bluetooth.

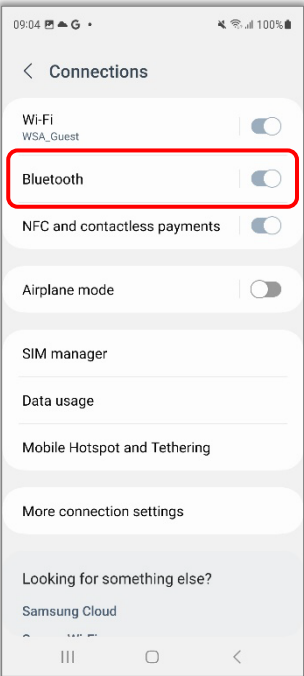

Paso 11

Sus audífonos aparecerán en Dispositivos emparejados (estos son los emparejamientos de la app Signia, es posible que vea una o dos listas según el teléfono).

También aparecerán una vez en Dispositivos Disponibles. **Toque el audífono disponible y luego toque Emparejar.** Esto emparejará sus audífonos para la transmisión de audio.

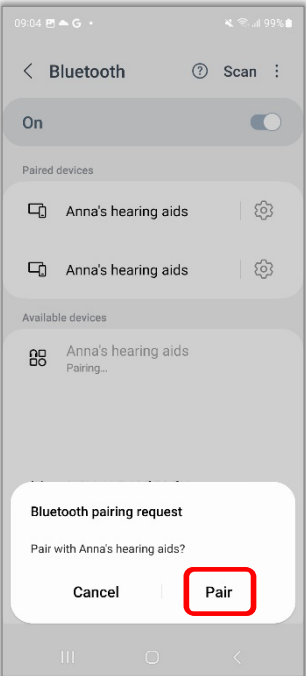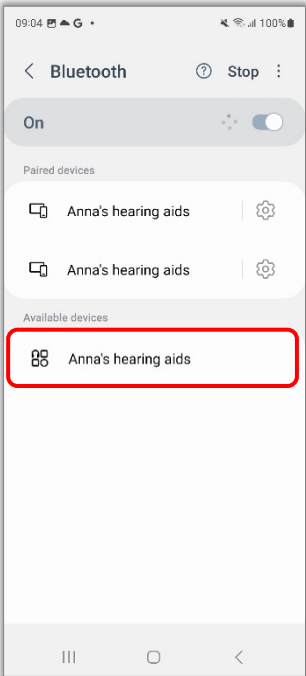

Paso 12

Ahora está listo para disfrutar de la transmisión de audio a sus audífonos.

