

## Guía de Inicio Rápido

# Cómo emparejar Pure Charge&Go BCT IX a un iPhone



Bluetooth®  
Connectivity  
Transformed

Sus audífonos usan dos tipos de conexiones Bluetooth®.

- Bluetooth® LE se utiliza para conectar cada audífono individualmente a la app Signia y realizar ajustes de control remoto. El emparejamiento se realiza a través de la app Signia.
- Bluetooth® Classic permite conectar sus audífonos para transmitir llamadas y audio. El emparejamiento se realiza a través del menú Bluetooth de su teléfono.

Siga los sencillos pasos a continuación para emparejar ambos tipos de conexiones Bluetooth.

### Paso 1

Descargar la Aplicación Signia (versión 2.7.0 o superior).



### Paso 2


Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado.



*Nota: Si sus audífonos ya están emparejados con otro dispositivo cercano, desactive el Bluetooth en ese otro dispositivo durante el proceso de emparejamiento.*


### Paso 3

Abrir la app Signia.

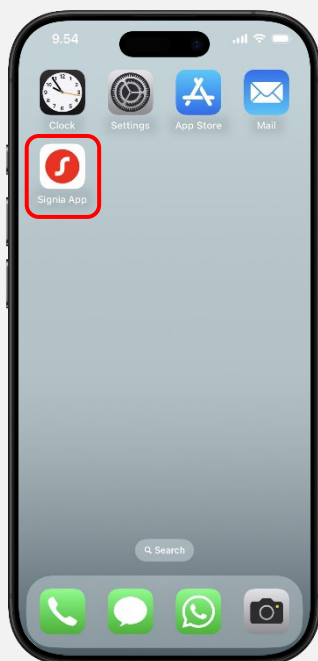


### Paso 4

Toque la opción de **emparejamiento Bluetooth**.

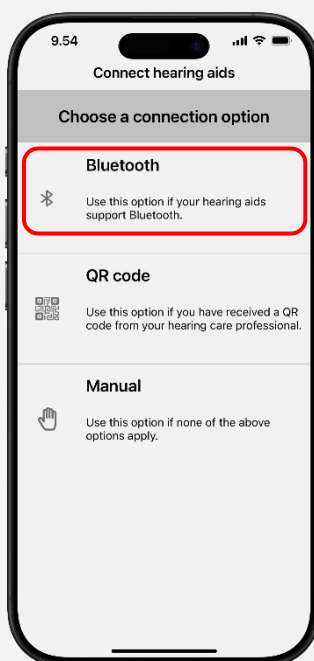


### Paso 5

**Apague y vuelva a encender sus audífonos** para ponerlos en modo de emparejamiento durante aprox 3min. Toque **OK**.

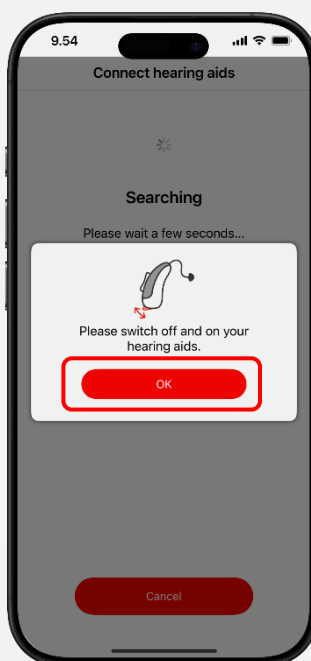


### Paso 6

Cuando aparezcan sus audífonos, **toque su nombre** para seleccionarlo.

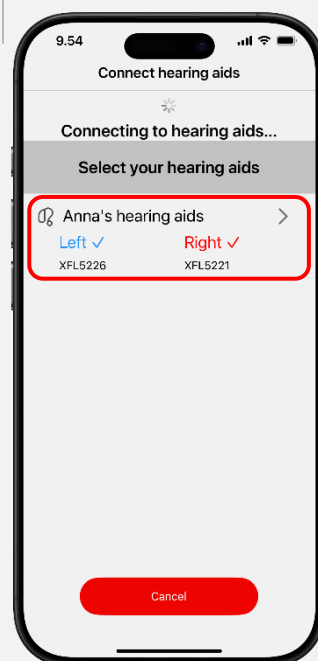

## Paso 7

Aparecerá una solicitud de emparejamiento por Bluetooth **toque "Emparejar"**: Si está emparejando dos audífonos, esto se repetirá dos veces.

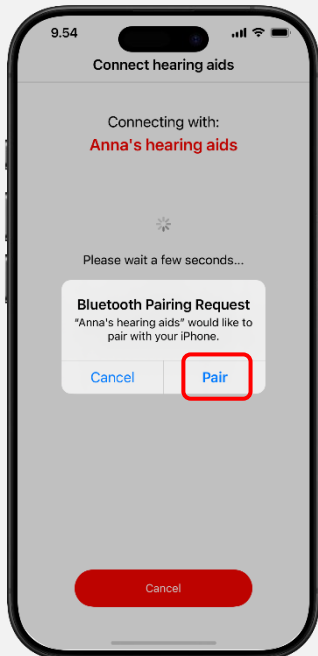

## Paso 8


Los audífonos ya están emparejados con la app Signia.

Los siguientes pasos los emparejarán para la transmisión de audio.




## Paso 9

Abra el menú de **Configuración** de su teléfono, luego **toque Bluetooth** para abrir el menú de Bluetooth. **Apague y vuelva a encender** sus audífonos para ponerlos en modo de emparejamiento.

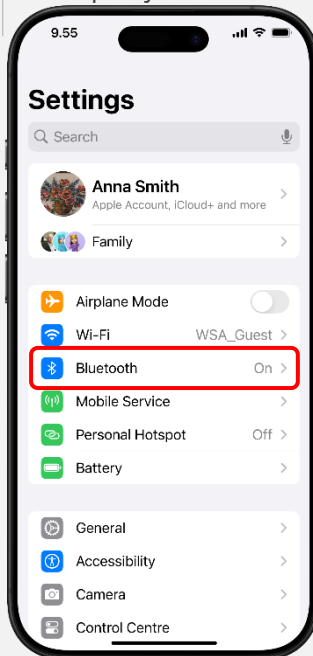


## Paso 10

Verá dos audífonos conectados en Mis Dispositivos (los emparejamientos de la app Signia). Un tercer audífono aparecerá en Otros Dispositivos. **Toque el nombre del audífono** para emparejarlo.

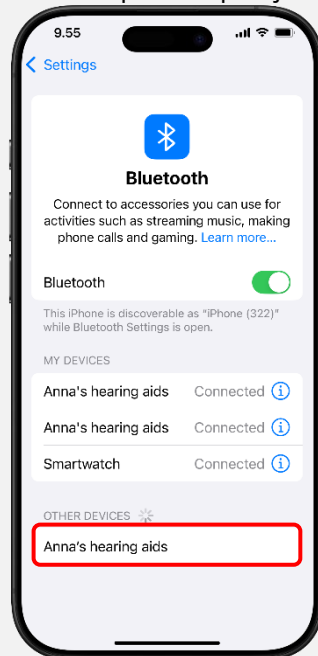


## Paso 11

**Toque el ícono** ⓘ junto al nuevo audífono emparejado. (Solo el audífono emparejado para transmisión mostrará las opciones del menú en los pasos 12 y 13).

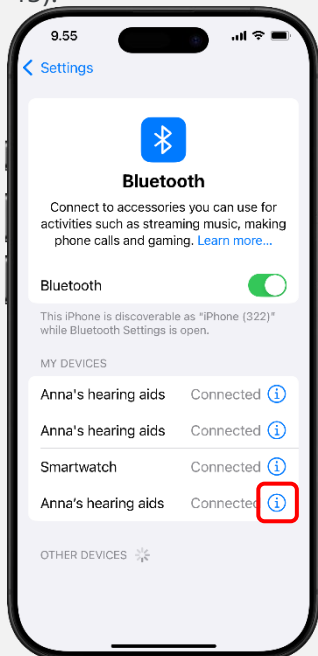


## Paso 12

Toque la **flecha a la derecha** del nombre del audífono y **escriba un nombre nuevo** para distinguir este emparejamiento de los dos de la app Signia.

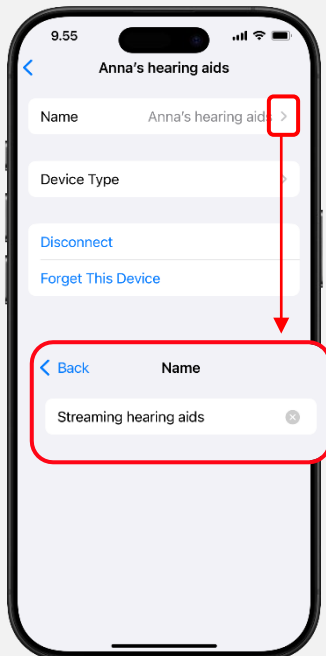

## Paso 13

**Toque la flecha a la derecha** de Tipo de dispositivo y **seleccione Audífono** en la lista de opciones que se abrirá.

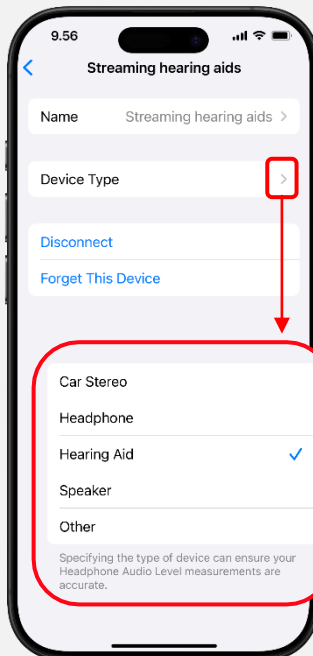

## Paso 14

Ahora está listo para disfrutar de la transmisión de audio a sus audífonos.

