

Guía de Inicio Rápido

Cómo emparejar Pure Charge&Go BCT IX a una PC





Paso 1

Apague sus audífonos y vuelva a encenderlos: esto los pondrá en modo de emparejamiento durante aproximadamente 3 minutos.

Nota: Si sus audífonos ya están emparejados con otro dispositivo cercano, desactive el Bluetooth en ese otro dispositivo durante el proceso de emparejamiento.


Paso 2

Abra **Configuración** haciendo clic en el ícono de Windows en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla y luego haciendo clic en **Configuración**.

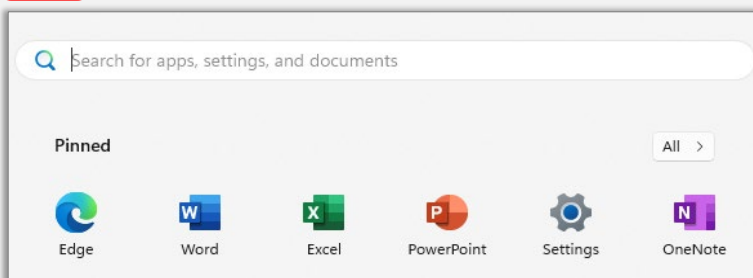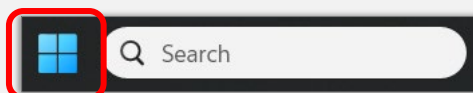


Paso 3

En el lado izquierdo de la pantalla Configuración, seleccione **Bluetooth y dispositivos**.

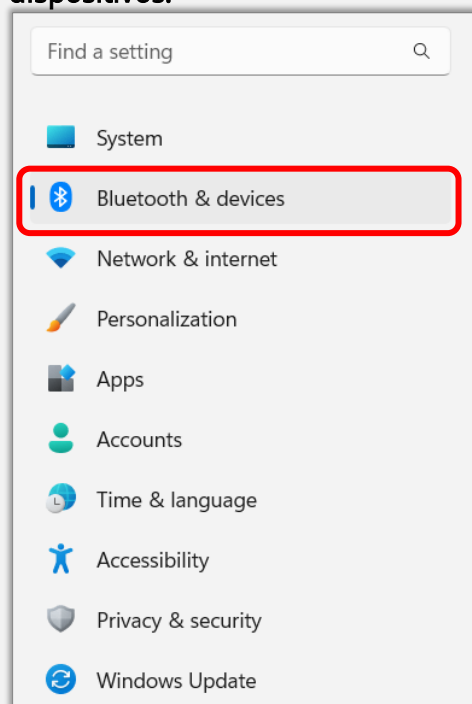

Paso 4

Asegúrese de que el interruptor de Bluetooth esté activado y haga clic en **Agregar dispositivo**.

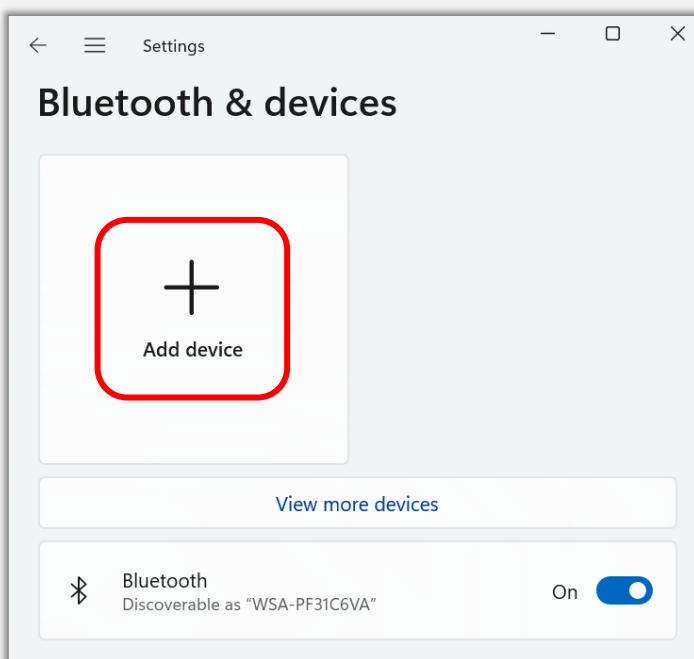

Paso 5
Haga clic en el dispositivo **Bluetooth**.

Add a device

Choose the kind of device that you want to add.



Bluetooth
Audio devices, mice, keyboards, phones, pens, controllers, and more



Wireless display or dock
Wireless monitors, TVs or PCs that use Miracast or wireless docks



Everything else
Xbox controllers with Wireless Adaptor, DLNA and more

Paso 6
Puede que la detección de los audífonos tarde unos instantes. Haga clic en el **nombre del audífono** para completar el emparejamiento.

Add a device

Add a device

Make sure your device is turned on and discoverable. Select a device below to connect.



Anna's hearing aids
Audio

Paso 7
Disfrute de la transmisión desde su computadora a sus audífonos Pure Charge&Go BCT IX.

Add a device

Your device is ready to go!



Anna's hearing aids
Connected mic, audio

Disconnect



Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de WSAUD A/S se realiza bajo licencia.