

## Guía de Inicio Rápido

# Cómo usar Pure Charge&Go BCT IX con varios dispositivos emparejados



Bluetooth®  
Connectivity  
Transformed

Sus audífonos Pure Charge&Go BCT IX se pueden emparejar con varios dispositivos simultáneamente, lo que le permite cambiar fácilmente entre diferentes dispositivos.

### Cómo cambiar entre teléfonos emparejados para realizar ajustes de control remoto a través de la aplicación Signia

Puede usar la app Signia en cualquier teléfono emparejado en cualquier momento para realizar ajustes de control remoto (por ejemplo, cambiar el volumen o el programa de audición), sin necesidad de realizar ningún paso adicional.

### Cómo cambiar entre dispositivos emparejados para transmitir audio

Para cambiar entre diferentes dispositivos emparejados para la transmisión de audio, simplemente desconéctese de la conexión Bluetooth de un dispositivo y conéctese al otro dispositivo. *Tenga en cuenta que esto no significa que deba desvincular/reparar los dispositivos cada vez; consulte los ejemplos a continuación.*

#### Ejemplo 1: Cambiar la conexión de un iPhone a una computadora


Desconecte sus audífonos de su teléfono mediante una de estas opciones:

##### Desactive el Bluetooth en su teléfono


o

- Abra el menú Bluetooth de su teléfono, toque el ícono ⓘ junto al audífono con la conexión de transmisión y toque Desconectar (vea las capturas de pantalla a la derecha).

*En este teléfono de ejemplo, se cambió el nombre del audífono con conexión de transmisión para que sea más fácil de identificar (consulte la Guía de inicio rápido: Cómo emparejar Pure Charge&Go BCT IX con un iPhone).*

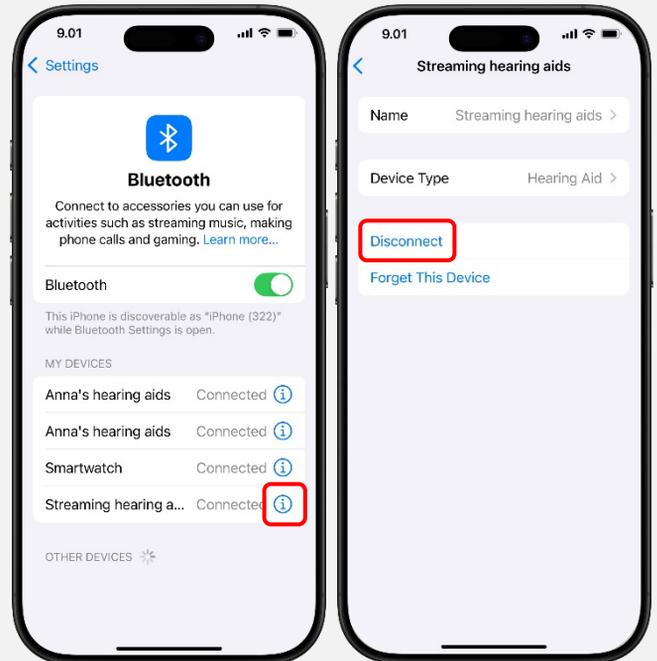

En su computadora, abra el menú **Bluetooth y dispositivos** y haga clic en **Conectar** junto a sus audífonos.

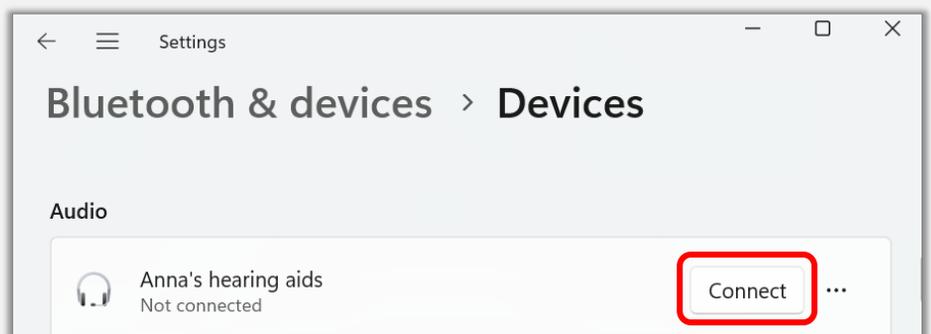

## Ejemplo 2: Cambiar la conexión de un teléfono Android a una computadora


Desconecte sus audífonos de su teléfono mediante una de estas opciones:

### Desactive el Bluetooth en su teléfono


o

- Abra la lista de dispositivos conectados en el menú Bluetooth de su teléfono y desconecte el audífono de la conexión de streaming. En este teléfono de ejemplo, se hace **tocando el nombre del audífono** para alternar entre conectado y desconectado.

*Tenga en cuenta que los detalles del menú pueden variar entre los modelos de teléfonos Android.*

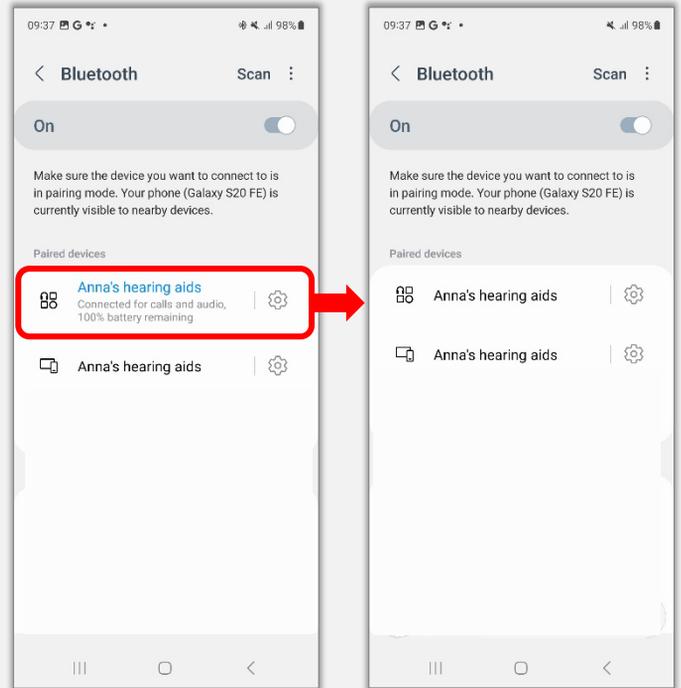


En su computadora, abra el menú **Bluetooth y dispositivos** y haga clic en **Conectar** junto a sus audífonos.

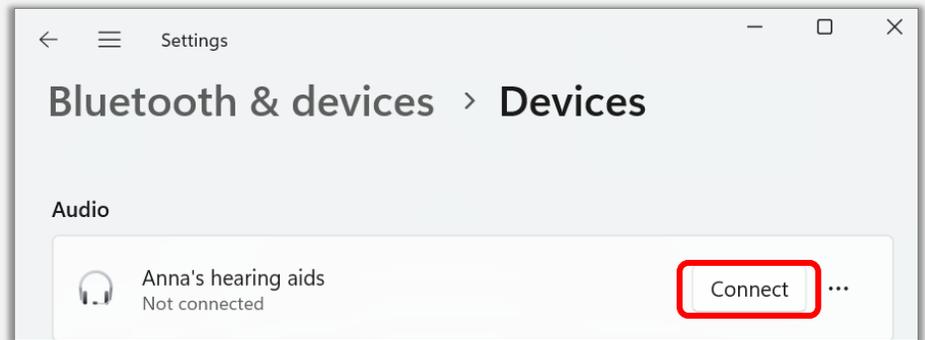

## Ejemplo 3: Cambiar la conexión de una computadora a un teléfono

En su computadora, abra el menú **Bluetooth y dispositivos**, haga clic en los **tres puntos** en el extremo derecho del nombre de su audífono y haga clic en **Desconectar**.

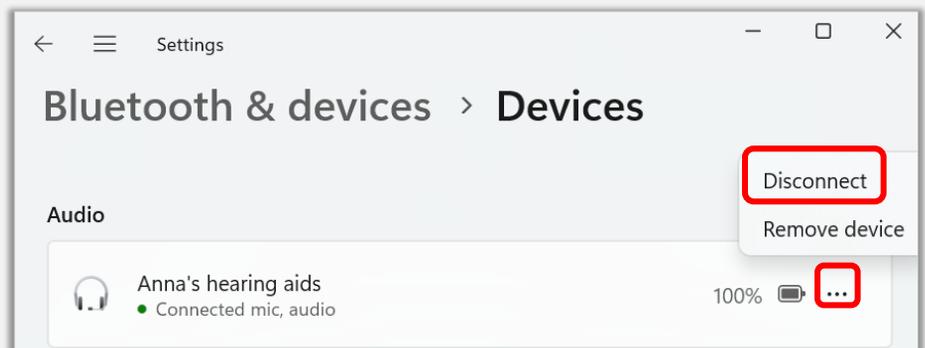

En su teléfono, simplemente invierta el proceso que utilizó para desconectar sus audífonos:

- Cómo volver a activar el Bluetooth del teléfono
- o
- Reconexión de los audífonos en el menú Bluetooth

*Apple, el logotipo de Apple, App Store y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. Android es una marca comercial de Google LLC. Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de WSAUD A/S se realiza bajo licencia.*