

Guía de inicio rápido


Signia TV Sound

Audio estéreo de alta calidad transmitido directamente a sus audífonos Signia con Bluetooth®



Cómo conectar el TV Sound


1. Tome el cable Micro USB que recibió con su TV Sound
2. Conecte el cable Micro USB al dispositivo TV Sound
3. Conecte el Micro USB a su televisor a través del puerto USB de su televisor
4. El televisor debe estar encendido

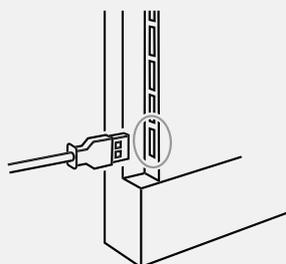

Cómo conectar la entrada de audio


A través de cable analógico

1. Conecte el TV Sound a la fuente de alimentación
2. Conecte el cable analógico a la parte posterior del TV Sound (entrada violeta)
3. Conecte el otro extremo del cable analógico a los enchufes correspondientes del televisor
4. Encienda el televisor para iniciar el audio

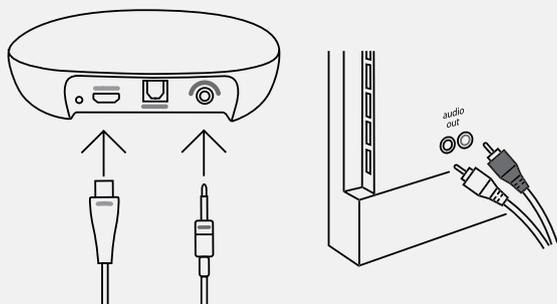

A través de cable óptico

1. Conecte el TV Sound a la fuente de alimentación
2. Conecte el cable óptico a la parte posterior del TV Sound (entrada azul)
3. Conecte el otro extremo del cable óptico a la toma "Optical OUT" del televisor.
4. Encienda el televisor para iniciar el audio

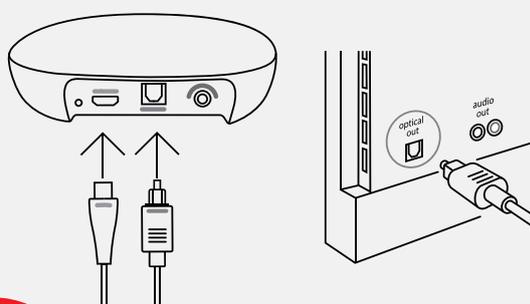

signia

Guía de inicio rápido

Signia TV Sound

Cómo emparejar sus audífonos a TV Sound

1. Encienda el TV Sound
2. Reinicie los audífonos
3. Coloque los audífonos en el rango de emparejamiento (de 0 a 20 cm)

- LED parpadea en azul durante el emparejamiento
- LED permanece en azul fijo luego de un emparejamiento exitoso

Para emparejar varios juegos de audífonos, simplemente siga el mismo procedimiento nuevamente para cada par.

CONSEJO: Si los audífonos ya están emparejados con otro dispositivo (como un teléfono), asegúrese de que no esté cerca o apague el Bluetooth® durante el emparejamiento del sonido del televisor

Comenzar la transmisión con Signia app

Paso 1:

- Abrir Signia App
- Tocar Stream en la parte inferior del menú

Paso 2:

- Tocar Play para comenzar la transmisión de TV audio

Paso 3:

- Ajustar el volumen si lo desea
- Tocar Pausa para detener la transmisión

