


# Signia Assistant

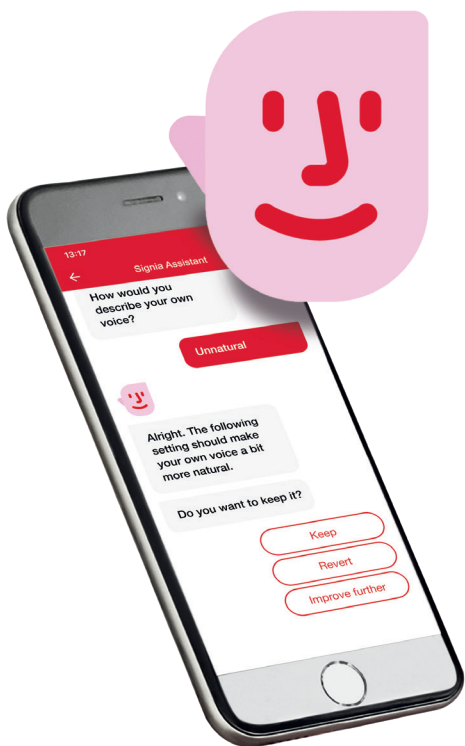

# SUPPORTO

## A PORTATA DI MANO

La nuova Signia Assistant aiuta a sentire ciò che è importante e a rimanere coinvolti in ciò che ci circonda.

Grazie all'intelligenza artificiale, Signia Assistant apprende le preferenze per offrire un'esperienza di ascolto personalizzata.



### Signia Assistant consente di:

- **Personalizzare le impostazioni in base alle preferenze** per una migliore comprensione del parlato nelle differenti situazioni
- **Ricevere risposte** su come utilizzare gli apparecchi acustici
- **Ricevere un supporto intuitivo, 24/7**, ovunque ci si trovi


## SIGNIA ASSISTANT INTEGRATA NELLA NUOVA SIGNIA APP

### Due tipologie di controllo tramite Signia app:




1. **Controllo da remoto tradizionale** con possibilità di regolare volume e bilanciamento sonoro per modifiche temporanee, che vengono ripristinate quando si spengono gli apparecchi acustici
2. **Signia Assistant** per regolazioni personalizzate per aiutare a sentire in maniera ottimale. Le modifiche rimangono in essere anche dopo aver spento gli apparecchi acustici.


# Come utilizzare la nuova Signia Assistant

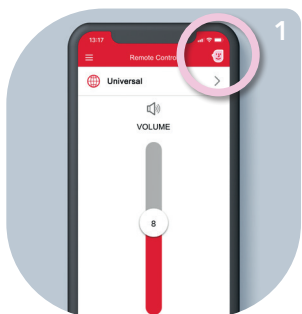


1  
Aprendo la Signia app, apparirà in alto a destra l'icona della Signia Assistant

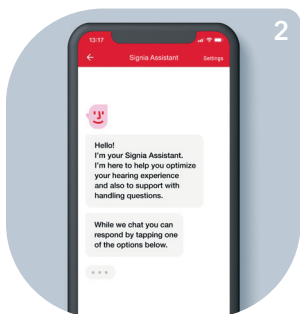


2  
Cliccando sull'icona si attiverà la conversazione con Signia Assistant

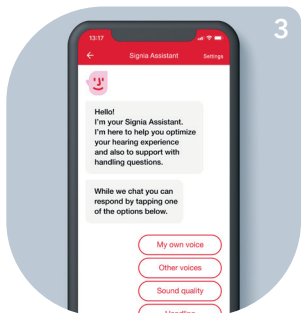


3  
Scegli da un elenco di opzioni in base alle tue necessità

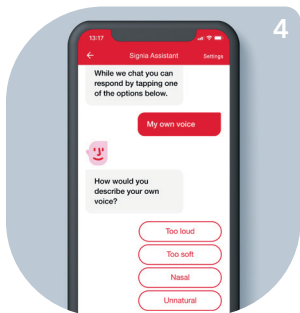

4  
Continua a rispondere alle domande di Signia Assistant

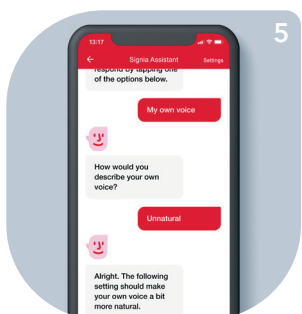


5  
In base alle risposte, Signia Assistant suggerisce miglioramenti audio istantanei

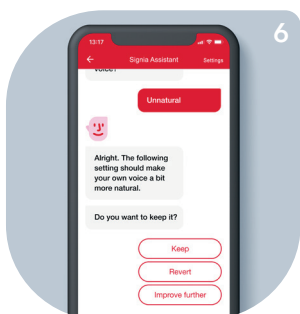

6  
È possibile: mantenere le nuove impostazioni, ripristinare le precedenti o continuare con le modifiche

Gli stessi passaggi si applicano in caso di domande sulla gestione.

Signia app è compatibile con Android e iOS.  
Il download è gratuito dai rispettivi Google Play Store e Apple App Store.

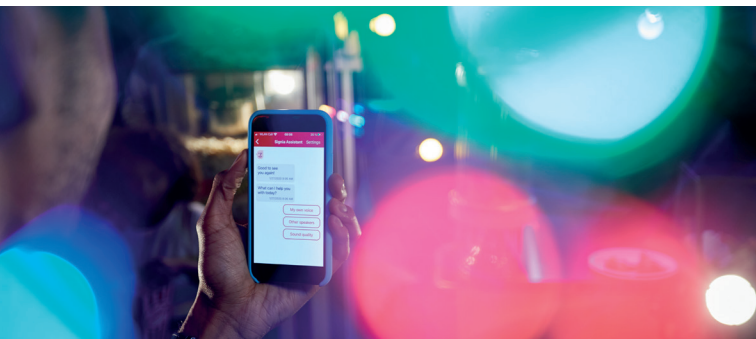

Le informazioni riportate nel presente documento rappresentano una descrizione generale delle funzionalità tecniche. Queste potrebbero non essere disponibili in tutti i singoli casi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

I marchi e nomi commerciali citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

INFORMAZIONE TECNICA DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DEGLI SPECIALISTI DEL SETTORE

### **Produttore legale**

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Germania

### **Contatto locale**

Sivantos Srl  
Via Dei Missaglia 97  
20142 Milano | Italia  
Tel. 02 8721 8600

Codice n.020 02 20 | Stampato in Italia  
© 02.2020 Signia GmbH

Seguiteci su:

[signia.it](http://signia.it)



[signiahearing](https://www.facebook.com/signiahearing)



[signiahearing](https://www.youtube.com/signiahearing)



[@signiahearing](https://www.instagram.com/signiahearing)