

はじめにお読みください

補聴器 早わかりガイド

(2024年12月版)

耳かけ型



耳あな型は裏面をご覧ください。



QRコードをスマホで読み取ってください。
シグニア補聴器公式YouTubeチャンネルで充電器の使い方、電池の替え方、補聴器の装着方法、耳せんの交換方法、等を動画でご確認いただけます。

WSオーディオロジージャパン株式会社

1 電源を入れましょう

充電タイプ

スロットから取り出す→**電源オン**
数秒後に補聴器から音が出始めます。
※充電タイプの機種により、電源オンの方法が異なります。詳しくは表紙掲載のQRコードから動画でご確認いただけます




スロットに入れる→**電源オフ**
スロットの奥まで補聴器を入れると、磁石がカチッとくっつくような感覚があります。このとき、充電器がオン状態であれば補聴器の充電が開始します。

電池タイプ



でっぱりに爪をかけ、ゆっくりと手前に引きます。

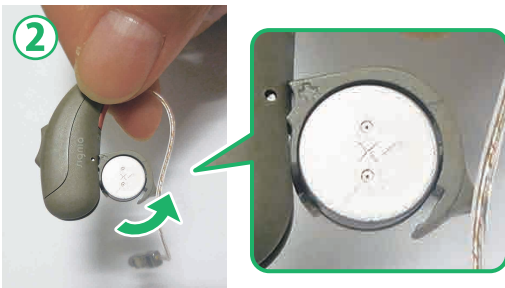

電池の平らな面を **上** にして電池を入れます。

うまく入らないとき

電池室の **+** 印と電池の **平らな面** が **上** です。



⚠ 電池を **逆向き** に入れないでください。
※破損の原因になります。

電池の出し方

補聴器の電池室を開けて、付属のマグネット付き掃除ブラシに付けて持ち上げてください。



※一部機種では別売です。


2 耳につけましょう・外しましょう

耳につけるときの流れ

耳かけ型



イヤモールドを持ちます。

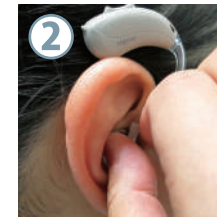


イヤモールドを後ろに回しながら耳に入れます。



補聴器を耳にかけます。

RICタイプ

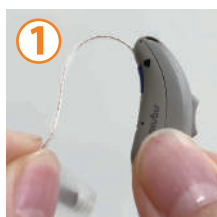

補聴器を持ちます。




補聴器を耳にかけてからチューブの曲がりをつまんで耳せんを耳の中へ入れます。




チューブ固定用コンチャロックが付いている場合、コンチャロックを持って耳のくぼみへ入れます。

オープンタイプ

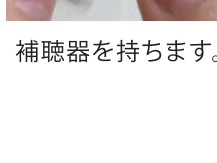

補聴器を持ちます。

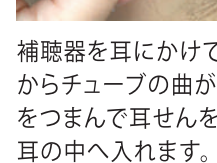

補聴器を耳にかけてからチューブの曲がりをつまんで耳の中へ入れます。

耳かけ型

うまく入らないとき



曲がりの部分を指で押し込みます。

耳から外すとき



曲がりの部分をつまんで取り出します。



補聴器を引っばらない。

RICタイプ

うまく入らないとき



曲がりの部分を指で押し込みます。

耳から外すとき



曲がりの部分をつまんで取り出します。



補聴器を引っばらない。

オープンタイプ

★耳あな型・耳かけ型 共通のご案内

電気端子も定期的に清掃しましょう

充電器および補聴器の電気端子は乾いた綿棒やティッシュを使って優しく拭いてください。汗や汚れが蓄積すると、通電不良や故障の原因になります。

ガンコな汚れには 化粧品や日焼け止め、皮脂の油等が付着すると綿棒掃除だけでは落ちづらく、電気の流れが妨げられると充電エラーにつながります。別売りのアクセサリ「**クリーニングシート**」や、「**クリーニングスプレー**」の併用をお勧めします。クリーニング液をごく少量、綿棒の先端に湿らせて端子を拭いてください。

充電タイプ

電気端子

耳かけ型の場合



矢印の電気端子の汗や湿気を綿棒で拭きます。

耳あな型の場合



電池タイプ

電気端子



電池室の中および電気端子の汗や湿気を綿棒で拭きます。

充電端子のお掃除に次のものは使わないでください

- 一般的なウェットティッシュ (水分が多くサビの原因になります)
- 高濃度アルコール・シンナー・ベンジン (塗装や補聴器本体を溶かしたり変形させます)

例外

耳あな型「非接触」充電タイプInsio Charge & GO AXの充電器は、充電のための金属端子を持たないため、充電器のガンコな汚れに一般的なウェットティッシュをご利用いただけます。



※ 2ヶ月に一度は点検をかねて販売店でクリーニングをしてもらうことをお勧めします。




重要

3 毎日お手入れしましょう

補聴器は身につけるものなので毎日のお手入れで清潔に使いましょう

耳かけ型

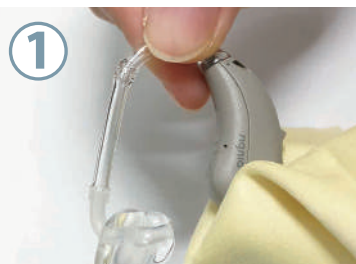

柔らかい布で表面の汚れをふき取ります。



ブラシを下にして音の出口とベントを掃除します。

RICタイプ




柔らかい布で表面の汚れをふき取ります。



柔らかい布で耳せんの汚れをふき取ります。

オープンタイプ

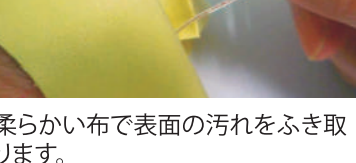

柔らかい布で表面の汚れをふき取ります。

充電タイプ

③ **【充電】**
補聴器を使用しないときは、充電器に収納して充電します。



【補聴器の乾燥】
汗や湿気は、補聴器にとって最大の故障原因になります。充電時には併せて乾燥機のご使用をお勧めします。



ドライ＆クリーン充電器をお使いの場合、併せて乾燥・除菌をおこないます。



ドライキャップ UV2.1(別売)は、充電器の上からかぶせて使うため、補聴器を充電しながら乾燥・除菌をおこないます。

電池タイプ

③ **【充電】**
補聴器を使用しないときは、電池室を開けて補聴器乾燥カップに入れます。



電池

フタをしっかり閉めます。 ※電池はフタのマグネットに付けます。



④

・補聴器乾燥カップと乾燥シリカゲルは一部機種には付属していません。別売アクセサリの補聴器乾燥カップまたは電気式乾燥機をご利用ください。
・乾燥シリカゲルは色が変わったら、交換してください。

※耳せんは消耗品です。3ヶ月を目安に交換をおすすめします。

はじめにお読みください

補聴器 早わかりガイド

(2024年12月版)

耳あな型



耳かけ型は表面をご覧ください。

表面右下(★印部分)にも耳あな型に関するご案内があります。



QRコードをスマホで読み取ってください。
シグニア補聴器公式YouTubeチャンネルで充電器の使い方、電池の替え方、補聴器の装着方法、耳せんの交換方法、等を動画でご確認いただけます。

WSオーディオロジージャパン株式会社

1 電源を入れましょう

充電タイプ

スロットから取り出す→電源オン
数秒後に補聴器から音が出始めます。
※充電タイプの機種により、電源オンの方法が異なります。詳しくは表紙掲載のQRコードから動画でご確認いただけます



スロットに入れる→電源オフ
スロットに補聴器を入れると、磁石がカチッとくっつくような感覚があります。このとき、充電器がオン状態であれば補聴器の充電が開始します。

電池タイプ

お客様の補聴器は？

CIC/
IIC

MC


ITC

COOL

ITE



でっぱりに爪をかけ、手前に引きまします。
電池室の+を上に向けまします。

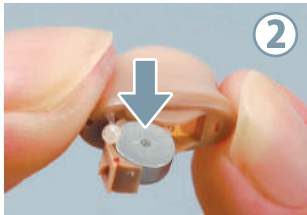


電池の平らな面(+極)を上にして電池を入れます。


注意!



電池を逆向きに入れないでください。

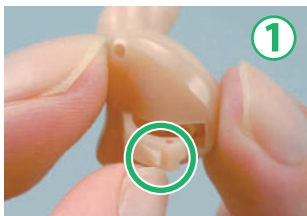

でっぱりに爪をかけ、手前に引きまします。
電池室の+を上に向けまします。

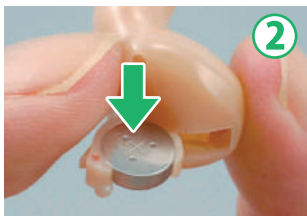

電池の平らな面(+極)を上にして電池を入れます。

電池の出しかた


- 電池室を開けます。
- 指先で電池をつまみ
- ななめにしながら取り出します。

※上記の方法で上手く取り出せない場合は次の方法で取り出してください。

マグネット付き掃除ブラシの使いかた



電池が小さくて掴みづらい場合は、付属のマグネット付き掃除ブラシに付けて、持ち上げてください。

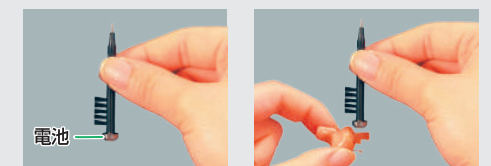

2 耳につけましょう・外しましょう

耳につけるとき


CIC/
IIC

MC


ITC

COOL


ITE

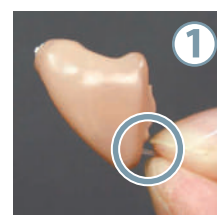


取り出しコードを下にして持ちまします。

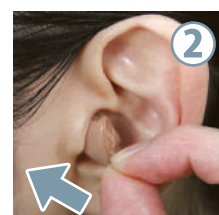


耳にまっすぐ入れまします。

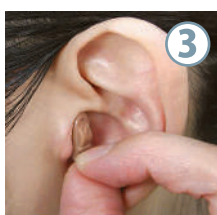

ピッタリするまで入れます。

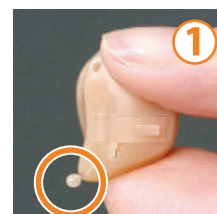

取り出しコードを下にして補聴器を持ちまします。

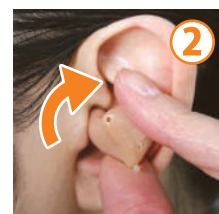


後ろに回すように入れます。



指で押し込みまします。

コードが無い場合は、写真を参考にしてください。(写真は左耳)

うまく入らないとき

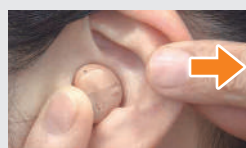

耳たぶを後ろにひっぱりながら入れます。

耳から外すとき

CIC/
IIC


MC

ITC

ITE



取り出しコードをつまんで取り出します。

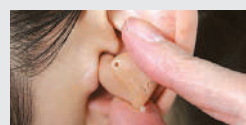

取り出しコードをつまんで取り出します。
コードが無い場合は、上下をつまんで取り出します。

【注意】：電池室を持って取り出さないでください。


重要

3 毎日お手入れしましょう


補聴器は身につけるものなので
毎日のお手入れで清潔に使いましよう



柔らかい布で表面の汚れをふき取りまします。

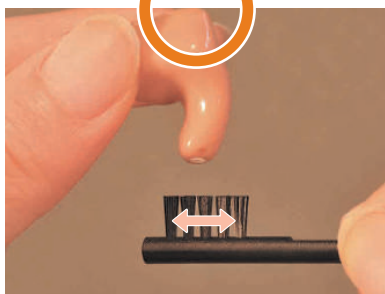

必ずブラシを下にして横に動かまします。
※ブラシを上にすると、内部に耳あかが入り故障の原因になります。

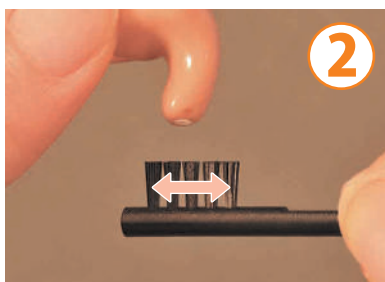

ブラシを下にして、耳あかプロテクタとベントを掃除まします。



充電タイプ

【充電】
補聴器を使用しないときは、充電器に収納して充電まします。



【補聴器の乾燥】
汗や湿気は、補聴器にとって最大の故障原因になります。充電時には併せて乾燥機のご使用をお勧めまします。



ドライキャップ UV2.1(別売)は、充電器の上からかぶせて使えるため、補聴器を充電しながら乾燥・除菌をおこないます。

電池タイプ

補聴器を使用しないときは、電池室を開けて補聴器乾燥カップに入れます。

電池
フタをしっかり閉めます。
※電池はフタのマグネットに付けまします。


・補聴器乾燥カップと乾燥シリカゲルは一部機種には付属していません。別売アクセサリーの補聴器乾燥カップまたは電気式乾燥機をご利用ください。
・乾燥シリカゲルは色が変わったら、交換してください。

4 古くなった耳あかプロテクタを交換ましよう


注意 クイックガードが正しくはめ込まれていないと、使用中に外れるおそれがあります。正しく入っているかご確認してください。

「クイックガード」の取り外し方・取り付け方

古いクイックガードの取り外し方

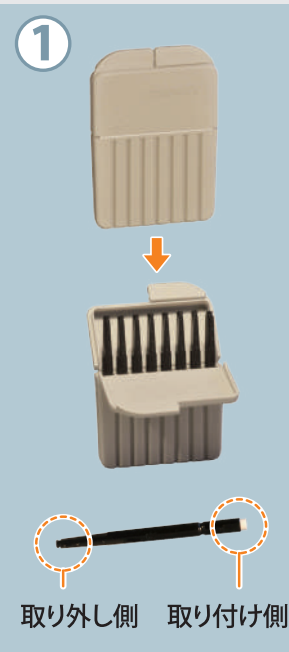

交換ツールを用意まします。

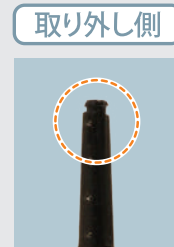

クイックガードが付いてまします。



交換ツールをまっすぐ挿しこみます




交換ツールが突き当たるまで差し込みまします。




まっすぐ引き抜き、クイックガードを取り外し廃棄してください。




交換ツールをまっすぐ挿しこみます。

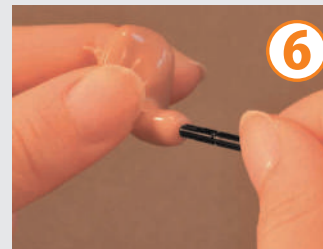

クイックガードが補聴器と同じ高さになるまではめ込みまします。

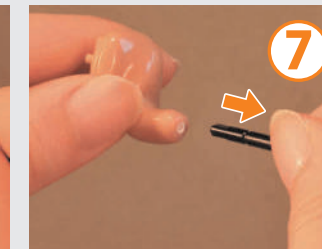

交換ツールを引き抜きまします。

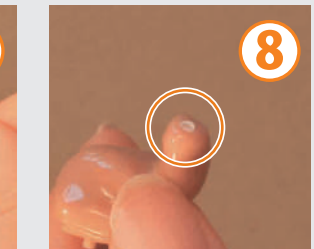

補聴器にクイックガードが取り付けられます。

※ 2ヶ月に一度は点検をかねて販売店でクリーニングをしてもらふことをお勧めまします。

表面右下(★印部分)にも耳あな型に関するご案内があります。

キ-10245207 / Rev.B 2025.8